

PRONTOSAN® WOUND SOLUTION

SOLUCIÓN PARA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DE HERIDAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Prontosan® es una solución para la limpieza y descontaminación de heridas.

El componente activo principal para la limpieza de la herida y la acción contra el biofilm es la betaina, surfactante (detergente) anfótero capaz de penetrar, disgregar y retirar el biofilm y el detritus de las heridas.

La Polihexanida, con propiedades antimicrobianas de amplio espectro, reduce la carga bacteriana y previene la formación del biofilm.

COMPOSICIÓN

- Agua Purificada.
- 0.1% Undecilenamidopropil betaina.
- 0.1% Polihexanida.

INDICACIONES

Prontosan® Solución para el lavado de heridas, posee una excelente capacidad de limpieza y descontaminación de la superficie tisular incluso en heridas de difícil acceso, como cavidades, grietas o heridas profundas.

Prontosan® Solución para el lavado de heridas puede emplearse en los siguientes casos:

- Para la limpieza e irrigación más humedecimiento:
 - Heridas agudas:
 - Heridas mecánicas: laceraciones de la piel, mordeduras, cortes, rasguños y heridas por desgarro o aplastamiento.
 - Heridas post-quirúrgicas.
 - Heridas crónicas:
 - Úlceras por presión.
 - Úlceras vasculares.
 - Úlceras en pacientes diabéticos.
 - Heridas térmicas y químicas:
 - Quemaduras de 1er y 2º grado.



- Heridas post-radiación
- Fístulas, abscesos y celulitis.
- Orificios de entrada para catéteres venosos centrales, urológicos, tubos de PEG y tubos de drenaje.
- Limpieza de la piel perilesional.
- Para limpieza e irrigación intraoperatoria de heridas.
- Para instilación combinada con terapia para heridas con presión negativa (apertura del envase compatible con TPN).
- Para la humidificación de vendajes y apósitos incrustados antes de retirarlos.

INSTRUCCIONES DE USO

Las heridas deben siempre lavarse y limpiarse en lo posible con **Prontosan® Solución**.

Debe utilizarse tantas veces como sea necesario para que todos los depósitos y tejidos necróticos se puedan retirar fácilmente y la herida aparezca limpia. Esta es una buena condición previa para la curación natural de la herida.

Limpieza de la zona de la herida: con el fin de minimizar el riesgo de diseminación de microorganismos en la herida, se recomienda tanto la limpieza de la herida como de la zona que la rodea con **Prontosan® Solución**.

En las heridas agudas o que no revisten gravedad, es suficiente con enjuagar.

Para las heridas crónicas o infectadas se recomienda empapar la zona afectada con una gasa o compresa impregnada en **Prontosan® Solución**. Varios estudios muestran que la solución es eficaz desde el primer minuto pero se aconsejan exposiciones durante al menos 15 minutos en las lesiones con restos muy incrustados, adheridos o con sospecha de biofilm maduro. La aplicación posterior de **Prontosan® Wound Gel** (ver información individual sobre el producto) proporciona un efecto sostenido en contacto íntimo y duradero con la herida hasta el próximo cambio de apósito*.

La solución debe utilizarse sin diluir.

En caso de heridas de gran superficie y/o también de difícil acceso (por ejemplo en grandes quemados) es aconsejable la inmersión de toda la parte del cuerpo, al menos durante 15 minutos, en **Prontosan® Solución**.

Prontosan® Solución puede calentarse a temperatura corporal inmediatamente antes de su uso para evitar dolor por cambio de temperatura durante su aplicación.

Aplicación en casos de vendajes incrustados o en cambios complicados de apósitos: los vendajes a menudo se incrustan y se adhieren a la superficie de las heridas. Si estos vendajes se retiran sin humedecer pueden producirse nuevas lesiones en el lecho de la herida, lo que prolongará su cicatrización. En los casos de vendajes que son difíciles de eliminar, se recomienda humedecerlos con **Prontosan® Solución** hasta que sea posible retirarlos suavemente sin traumatizar la superficie de la herida. Si las incrustaciones son persistentes o extensas, saturar o bañar toda la parte del cuerpo afectada con **Prontosan® Solución** hasta que los vendajes puedan ser eliminados fácilmente.

Gracias al diseño exclusivo del envase con tapón de rosca perforable se consigue una irrigación de bajo caudal que permite presiones óptimas de lavado sin manipulación. El envase es colapsable y compatible con terapia de presión negativa mediante un adaptador especial.

Prontosan® Solución es compatible con otros apósitos basados en cura en ambiente húmedo (apósitos de espuma de poliuretano, apósitos de silicona, plata iónica, hidrofibras, alginatos...).

TOLERANCIA TISULAR Y BIOCOMPATIBILIDAD

No citotóxico, no irritante, no sensibilizante, indoloro, sin efecto inhibidor de la granulación o epitelización, dermatológicamente inocuo. A través de su aplicación clínica durante años ha quedado demostrada la alta tolerancia tisular a la polihexanida y a la undecilenamidopropil betaína incluso en pacientes que presentan heridas crónicas muy antiguas.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente y de acuerdo con la fecha de caducidad indicada.

Una vez abierto el producto puede ser utilizado durante 8 semanas.

Envase cerrado estéril.

PICTOGRAMAS



Producto Libre de Látex.

Marca CE

Producto Sanitario Clase III

PRESENTACIONES

Descripción	Presentación	Código B Braun
Prontosan® 350 ml	C/ 10 unidades	400403
Prontosan® 350 ml OTC	C/ 1 unidad	400417 C.N. 151521