

ALFOMBRILLA DESCONTAMINANTE

Alfombra descontaminante ideal para ser utilizada en todos los entornos donde se requiere la ausencia total de contaminantes y el mantenimiento de un alto nivel de higiene. Actúa como barrera antibacteriana, antipolvo y fungicida.

Producto de un solo uso, desechable. Producto libre de látex, DEHP, carcinógenos o sustancias tóxicas.

Materiales

Fabricado en Polietileno de baja densidad

- Agente antibacteriano fungicida: 1,2 Benzisothiazolin-3-one con espectro completo.
- Agente adhesivo: acrílico en suspensión acuosa.
- Film protector 40 micras
- Hoja mono adhesiva 50 micras y adhesividad 250 + 50 / -50 cN / 25 mm 1.0 + 0.2-0.2 N / cm (AFERA 4001 method)
- Hoja bi adhesiva 70u y adhesividad 600 + 120 / -120 cN / 25mm / 2.4 + 0.48 / -0.48 N / cm (AFERA 4001)
- Hoja protectora inferior 0.14mm
- Capas: 30 hojas
- Altura total 1,23mm.



Multicapa

Lengüeta numerada removible para facilitar el cambio de hoja.

30 hojas numeradas de manera decreciente.

Lámina de protección superior e inferior.

MODO DE EMPLEO DE LA ALFOMBRA DESCONTAMINANTE

- › Limpiar y secar la zona donde se va a colocar la alfombra.
- › Retirar en primer lugar la lámina protectora inferior. Adherir al suelo de modo que no se formen pliegues o arrugas.
- › Retirar la lámina protectora superior para así dejar expuesta la primera hoja descontaminante.
- › Según uso, ir retirando las hojas cuando se precise realizar cambio hasta la última.
- › La duración de cada hoja depende solo de las condiciones de uso.
- › Para eliminar, realizarlo acorde a las leyes y reglas relativas a la eliminación de materias plásticas.

Inflamabilidad: baja, el producto puede inflamarse solo si entra en contacto con llamas abiertas. Si se inflama podría causar desgarro y asfixia.

Contacto: Con la piel sólo en caso de hipersensibilidad subjetiva, enjuagar con agua fría, poner como protección una gasa y consulte a su médico.

BENEFICIOS

- › Actúa no solo contra la materia como el polvo o partículas, sino que también posee un tratamiento antibacteriano y fungicida.
- › El diseño de capas con lengüeta facilita la tarea de exposición de una hoja nueva de manera más cómoda y fácil.
- › Mediante la numeración podemos llevar un control tanto de la cantidad de hojas del producto como del uso de la zona en la que está colocada y duración.
- › Excelente retirada gracias a su adhesivo de última capa, que facilita su reemplazo una vez finalizado.
- › Muy compacto de altura tan solo 1.8mm, lo que permite el paso tanto de calzado, como sillas de ruedas o camillas.
- › Disponible en varios tamaños para adaptarse por completo al área que necesite cubrirse.

REFERENCIAS, DIMENSIONES Y UNIDADES

Referencia	Ref Fabricante	Dimensiones	Presentación	EAN13
11545	TAP11545	115 x 45 cm	8 Blocks de 30 hojas	8432229266318
11560	TAP11560	115 x 60 cm	8 Blocks de 30 hojas	8432229266325
11590	TAP11590	115 x 90 cm	8 Blocks de 30 hojas	843222916914

Fabricadas por G.P.S. en conformidad con el Reglamento (EU) 2017/745. Producto Clase I, no estéril.