


ESPECULO VAGINAL CUSCO

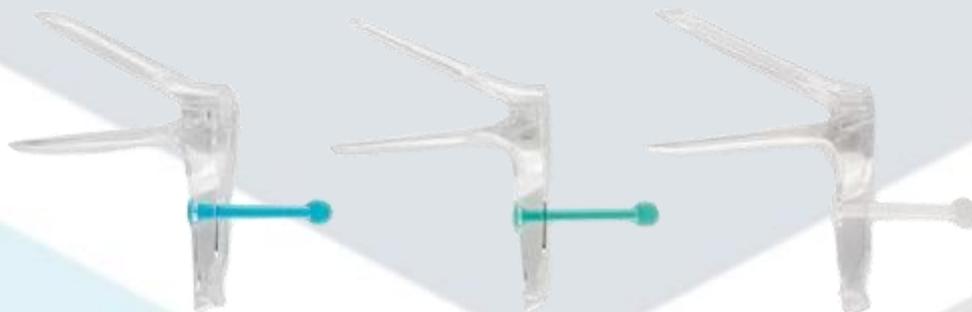

DESCRIPCIÓN

Espéculo ginecológico tipo Cusco, estéril, sin látex, sin DEHP y de un sólo uso.

Conformidad

Producto de Clase I estéril.

Certificación ISO: Jiangsu Kangjin Medical Instrument Co., Ltd., tiene implementado y mantiene un sistema de calidad conforme a las exigencias de las Normas ISO 13485.

Oiarso S. Coop. (Bexen medical®) tiene implementado y mantiene un sistema de calidad conforme a las exigencias de las Normas ISO 13485, ISO 9001 e ISO 14001.

Marcado CE según la Directiva Europea 93/42/CEE.

Utilización

Instrumento utilizado en ginecología y obstetricia que permite abrir la cavidad vaginal mediante la separación de las paredes de la vagina para poder visualizar y examinar el cuello uterino y la vagina, y proporcionar un acceso al canal cervical y a la cavidad uterina para practicar exámenes de diversos tipos y pequeñas intervenciones quirúrgicas no invasivas.

Materiales utilizados

Poliestireno transparente de alta resistencia

Presentación

Unidad de empleo: Envase rasgable

Presentación: caja de 100 unidades

Esterilización

Proceso: Óxido Etileno (EO)

Periodo de caducidad: 3 años desde fecha de esterilización.

Modo de empleo

- Rasgar el envase a la altura de la muesca de apertura;
- Asirlo con la mano a la altura del mango – No sujetarlo por las valvas;
- Introducir el espéculo en la vagina de la paciente;

- Una vez situado en posición, definir la abertura deseada y bloquear el espejulo mediante el giro de un cuarto de vuelta del tornillo;
- Proceder al examen ginecológico o a la cirugía no invasiva;
- Después de su utilización, depositar el dispositivo y su embalaje en un recipiente dedicado especialmente a tal efecto.

Riesgos de la reutilización

No Reutilizar. La reutilización de los productos sanitarios puede provocar.

- Problemas de esterilidad por contaminación biológica así como desatar reacciones pirogénicas.
- Problemas de contaminación cruzada y enfermedades de transmisión sexual.
- Cambios físico-químicos que puedan comprometer las propiedades y prestaciones de los Productos

Ventajas

Para la paciente:

- Mayor confort gracias a un contacto más suave y prevención de choque térmico ;
- Borde redondeado y ausencia de ruido durante la manipulación ;
- Menor impacto psicológico debido a la utilización de un dispositivo de un sólo uso.

Para el especialista:

- Transparencia perfecta;
- Adaptabilidad a la morfología de la paciente;
- Tornillo de seguridad con bloqueo rápido;
- El código de colores permite identificar rápidamente los diferentes tamaños disponibles;
- Práctico y sin necesidad de acondicionamiento, utilización económica.

Ref.	Tamaño	Color	Código de barra envase unitario (EAN)	Código de barra caja (DUN14)
705.01	« Virginal » 16 mm Ø	Verde	6941991338090	16941991338097
703.01	« Estándar » 24 mm Ø	Azul	6941991338083	16941991338080
701.01	« Grande » 30 mm Ø	Blanco	6941991338076	16941991338073

FABRICADO POR	EC REP
Jiangsu Kangjin Medical Instrument Co., Ltd. 56 Changzheng Rd. Zhenglu Town, 213111 Changzhou P.R. CHINA	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg - GERMANY