



Canisters con válvula on/off para bolsas de aspiración flexibles Flex Advantage® del Sistema Medi-Vac®

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Contenedores rígidos reutilizables transparentes con graduaciones, brazo de sujeción a pared o a carro y válvula on/off integrada para prevenir la pérdida de vacío, facilitar la expansión de la bolsa flexible y asegurar la hermeticidad del sistema. Diseñados para utilizar con las bolsas de aspiración flexibles Flex Advantage® del sistema de aspiración cerrado MediVac®. Se recomienda utilizar un canister de la misma capacidad que la bolsa. Las bolsas de aspiración flexibles Flex Advantage® del sistema de aspiración cerrado MediVac® se conectan a la fuente central de vacío para la recogida de fluidos corporales, líquidos y residuos de aspiración.

Son reutilizables, no estériles, están fabricadas en policarbonato (PC) y cloruro de polivinilo (PVC), transparentes que permiten ver el nivel de llenado, muy resistentes. Lleva incorporado un tubo trenzado anticolapsamiento para conectar la fuente de vacío central al puerto de vacío de las bolsas de aspiración flexibles Flex Advantage®.

Estos canisters o contenedores están disponibles en varias capacidades para cubrir las diferentes necesidades del personal clínico.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en Policarbonato (PC) y Cloruro de Polivinilo (PVC) de alta resistencia
- Transparentes con graduaciones para monitorizar el nivel de llenado
- Peso 225 gramos
- Tubo trenzado anticolapsamiento que conecta la fuente de vacío central al puerto de vacío de las bolsas de aspiración desechables
- Válvula on/off integrada para facilitar la expansión de la bolsa de aspiración
- Brazo de sujeción a pared o carro móvil
- Disponible en varias capacidades (1000 ml, 1500 ml y 3000 ml)
- Reutilizable
- Recomendación de limpieza y desinfectado de acuerdo con el protocolo hospitalario
- Agentes de limpieza recomendados: agua jabonosa tibia, lejía o cloro (NaOCl), etanol o isopropanol (alcohol isopropílico)

INDICACIONES

Diseñados para utilizar con las bolsas de aspiración flexibles Flex Advantage® del sistema de aspiración cerrado MediVac® para la recogida de fluidos corporales, líquidos y residuos de aspiración de forma fácil y segura.





Canisters con válvula on/off para bolsas de aspiración flexibles Flex Advantage® del Sistema Medi-Vac®

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Fabricados en Policarbonato (PC) y Cloruro de Polivinilo (PVC) de alta resistencia

REFERENCIAS

Referencia	Descripción	Capacidad	Uds/Caja
65652-611A	Canister con válvula on/off para bolsas de aspiración flexibles Flex Advantage® de 1000 ml	1000 ml	10
65652-616A	Canister con válvula on/off para bolsas de aspiración flexibles Flex Advantage® de 1500 ml	1500 ml	10
65652-631A	Canister con válvula on/off para bolsas de aspiración flexibles Flex Advantage® de 3000 ml	3000 ml	8

OBSERVACIONES

Marcado CE, Clase IIa

Reutilizables

No estéril

Exento de látex

Exento de Ftalatos (DEHP)

Caducidad 5 años

País de fabricación: Malta (Europa)