

## FONENDO DOBLE CAMPANA UNIDIX

Instrumento médico 100% destinado al uso por profesional para la auscultación y amplificación de los ruidos corporales, corazón, pulmones u otros órganos internos.

Fonendoscopio binaural con tubo flexible terminado en pieza torácica de doble cabeza con campana y diafragma. Esto permite escuchar ruidos de diversa frecuencia gracias a su regulación.

### Características

#### Características

- PVC Fabricadas en
- Plateados. □ Pieza para estabilizadora □ Extraíbles.
- Giratorios,



### Olivas

#### Auriculares

Fabricadas en aluminio □ Blancas.

introducir en los oídos □ En Y con barra ajustables.



#### Características Pieza torácica

FabricadoConsta de diafragma en

**Características** Fabricad o en PVC **Tubo** aluminio anodizado

- Negro o Permite su reemplazo mediante giro.
- Consta de campana
- Permite regular el uso mediante giro. o Rodeada de un aro suave negro

### MODO DE EMPLEO FONENDO DOBLE CAMPANA

- › Ajustar los auriculares a las orejas y colocar el extremo del diafragma sobre la zona corporal que se desea auscultar. El fonendoscopio capta así las vibraciones de los sonidos corporales, amplificados por el diafragma o membrana.
- › Al finalizar la auscultación, se recomienda desinfectar el aparato con alcohol al 75%.

## BENEFICIOS

- › Fonendoscopio muy ligero, no resulta pesado para el profesional.
- › Las olivas son extraíbles, lo que permite incidir más específicamente en su limpieza.
- › Auriculares con diseño que favorece la orientación anatómica hacia el conducto auditivo.
- › Permite amplio rango de auscultación tan solo mediante giro y selección de campana o diafragma
- › La campana presenta un anillo de goma que permite un contacto más suave y menos frío sobre la piel del paciente.

Referencia	Descripción	Cantidad	Codigo EAN
674F01	Fonendoscopio Doble Campana Adulto	1	8432229100544
30111400106	Fonendoscopio Doble Campana Pediátrico	1	8432229100544

Fabricado para GRUPO UNIDIX cumpliendo con el Anexo IX de la directiva 93/42EEC. Producto Clase I.  
Condiciones de almacenamiento: evitar la luz solar directa. Evitar el contacto con punzantes.

GRUPO UNIDIX C/ Fundiciones s/n  
Teléfono: +34 91 776 53 63  
042020-2

Polígono Ind. Vicálvaro. 28052. MADRID  
[www.grupo-unidix.com](http://www.grupo-unidix.com)