

ANILLO TORNIQUETE



Descripción técnica

Anillo de Compresión para Dedo (Tipo Smarch)

Descripción General:

Dispositivo de compresión diseñado para ejercer una presión controlada en los dedos, bloqueando la circulación sanguínea durante procedimientos quirúrgicos menores. Su uso está indicado exclusivamente en dedos previamente anestesiados. El diseño y grosor del anillo permiten una compresión eficaz pero suave, adecuada para procedimientos podológicos o quirúrgicos breves.

Aplicaciones Principales:

- Bloqueo temporal de la circulación sanguínea en intervenciones digitales.
- Sustituto funcional de la cinta Smarch en procedimientos podológicos o menores.
- Útil en entornos clínicos que requieren control de hemorragias localizadas.

Características Técnicas:

Propiedad	Valor
Función	Compresión digital / bloqueo circulatorio temporal
Duración máxima recomendada de uso	80 minutos
Extracción	Mediante corte en la ranura de seguridad
Material	Elástico médico con grosor controlado (tipo banda de compresión)
Presión	Suave, diseñada para uso sobre dedo anestesiado
Reutilizable	No – de un solo uso

Presentaciones Disponibles:

Código	Color	Diámetro Interior
F-03548-01	Naranja	9 mm
F-03548-02	Rojo	10 mm
F-03548-03	Verde	13 mm
F-03548-04	Azul	16 mm

Modo de Uso:

1. Asegúrese de que el dedo está correctamente **anestesiado** antes de aplicar.
2. Coloque el anillo en la base del dedo.
3. Realice el procedimiento en el tiempo recomendado (máximo 80 minutos).
4. Para retirarlo, **corte cuidadosamente por la ranura** prevista en el anillo.

Advertencias y Precauciones:

- No utilizar sin anestesia local.
- No superar el tiempo máximo recomendado.
- Supervisar continuamente el estado del dedo durante el uso.
- Desechar tras su uso.