

ELECTRODO MICROCIRUGIA AGUJA 55 mm



DESCRIPCIÓN

El producto consiste en un electrodo activo que se conecta a la punta del bisturí eléctrico.

Estéril por óxido de etileno

Caducidad: 3 años a partir de la fecha de fabricación

Materiales

- Electrodo: Acero inoxidable
- Punta electrodo: Tungsteno
- Tubo: PTFE
- Tubo: PVC Azul
- Bolsa : Film de celulosa, grado médico
- Film PET/PE

Código	Referencia	Longitud aguja	Longitud total	Ángulo
TCEB2HT	ABC-55 HT	3.0 ± 1 mm	55 mm	-

Instrucciones de uso

- Los accesorios electroquirúrgicos BLAYCO están diseñados para su uso con los bisturís eléctricos BLAYCO. Antes de utilizar la unidad electroquirúrgica y los accesorios, lea atentamente las instrucciones del fabricante.
- Inspeccione visualmente el envase para detectar posibles defectos antes de abrirlo. Sustituya el producto si el envase o la punta del electrodo presentan signos de deterioro.
- Consulte la fecha de fabricación y la fecha de caducidad impresas en el envase. Si el producto está caducado, sustitúyalo por otro que no le esté.
- Abra el envase empleando una técnica aséptica.
- Utilice el bisturí eléctrico de acuerdo con las instrucciones correspondientes y los protocolos médicos habituales.

Otras propiedades

- Cumple los requisitos de seguridad acorde al estándar de seguridad eléctrica IEC 60601-2-2.
- Los electrodos de tungsteno desechables son compatibles con todas las referencias de los mangos electro quirúrgicos de Blayco.

Biocompatibilidad

- ISO 10993-5: no citotóxico.
- ISO 10993-10: no sensibilizante a la piel.
- ISO 10993-10: irritación intracutánea negativo.

Conclusión: producto biocompatible

Conservación y mantenimiento

- Manténgase protegido de la luz solar directa/intemperie.
- Mantener en un lugar seco.
- Limitación de temperatura: -20°C - 60°C.
- Producto de un solo uso. No precisa mantenimiento.

FABRICANTE

TELIC