



## Adhesivo cutáneo tópico LiquiBand® Optima

**NOMBRE DEL PRODUCTO** Adhesivo tópico cutáneo LiquiBand® Optima  
**FABRICANTE** Advanced Medical Solutions Ltd



**DESCRIPCIÓN** Adhesivo cutáneo de uso tópico suministrado en un aplicador de un solo uso y envasado en sobre individual de papel y polipropileno.  
El producto se compone de una ampolla de vidrio rompible dentro de un aplicador de plástico con punta de seguridad de nilón flocado.  
El adhesivo permanece líquido hasta que se aplica sobre la piel y polimeriza en 10 segundos formando una capa uniforme con acción de barrera antimicrobiana.  
Resistente al agua.  
Cobertura de la herida: hasta 15 cm (Ref. LQ OPT001)  
Hasta 10 cm (Ref. LQ OPT002)

**INDICACIONES** Para el cierre de incisiones dérmicas en heridas limpias y recientes cuyos bordes se pueden unir con facilidad.  
Puede utilizarse junto con puntos de sutura subcutáneos.

**COMPOSICIÓN** El adhesivo cutáneo de uso tópico LiquiBand® Optima es estéril y líquido y contiene una formulación monomérica de 2-octilcianoacrilato (10%) y n-butilcianoacrilato (90%).  
Aplicador de plástico que aloja un vial de vidrio.  
**NO contiene látex.**

Referencia	Descripción: Adhesivo cutáneo tópico LiquiBand® Optima		
	Volumen/ud.	Presentación	GTIN
OPT001	Aplicador de 0,50 g	Caja de 10 sobres unitarios	5036912000437
OPT002	Aplicador de 0,35 g		5036912000550



<b>ESTERILIZACIÓN</b>	Radiación
<b>SEGURIDAD</b>	Producto estéril. No reutilizar
<b>CONSERVACIÓN</b>	Temperatura ambiente (5 – 25º C), protegido de la humedad, el calor y la luz directa
<b>CERTIFICACIÓN</b>	CE 2797
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Clase IIa
<b>CADUCIDAD</b>	18 meses
<b>MEDIO AMBIENTE</b>	Debe desecharse como residuo médico

## Características

Histocompatible

Cierre resistente y seguro, mayor resistencia que una sutura de nilón 4.0

Acción hemostática

Una única capa

Atraumático e indoloro

Excelentes resultados estéticos

Punta idónea para áreas pilosas. Eficaz en cuero cabelludo.

## Instrucciones de uso\*



### PASO 1

Con la punta del aplicador hacia arriba, presione las alas del dispositivo hasta romper el vial de vidrio del interior.



### PASO 2

Invierta la punta y apriete suavemente las alas para activarlo. Cuando la punta se llene, LiquiBand® Optima está listo para usar. Asegúrese de que la herida está limpia y seca antes de aplicar el adhesivo.



### PASO 3

Aproxime los bordes de la herida y aplique una película uniforme de adhesivo. Mantenga los bordes de la herida unidos durante 30 s.

\*Instrucciones abreviadas. Consultar Instrucciones completas incluidas en el producto.