

SISTEMA DE SUERO CON TOMA DE AIRE, FILTRO Y PUNTO Y UNIDIX

Dispositivo para infundir líquidos en el torrente sanguíneo del paciente por acción de la gravedad.

Con toma de aire para uso tanto con bolsas flexibles como con botellas de vidrio.

Posee un filtro en la cámara de goteo.

Posee un filtro en la cámara de goteo y un punto en Y para la administración de medicación puntual.

100% exento de látex y DEHP. Esterilizado mediante Óxido de Etileno.

Un solo uso, desechable.

Tapa protectora

Fabricado en Polietileno

- Translúcida
- Protege el punzón hasta su uso

Punzón

Fabricado en ABS

- Blanco
- Diseño con aletas a ambos lados.

Toma de aire

Fabricado en PVC

- Apariencia: Azul.
- Posee un filtro hidrofóbico de retención microbiana.
- Permite apertura y cierre.

Cámara de goteo

Fabricado en PVC

- Transparente
- Macrogoteo
- 20 gotas = 1 ± 0.1 ml agua destilada
- Libre de DEHP
- Posee un filtro de $15 \mu\text{m}$ para el fluido y retención de partículas.

Regulador del flujo

Fabricado en ABS

- Blanco
- Rueda de control de la velocidad de administración.
- Con dispositivo para anclar el tubo.

Tubo

Fabricado en PVC

- Transparente
- Flexible y sin memoria
- Antiacodable
- Longitud 180cm
- $\varnothing$ int. 3mm $\varnothing$ ext. 4.1mm
- Libre de DEHP

Punto Y

Fabricado en ABS

- Transparente
- Punto para punción con aguja

Conexión macho Luer-Lock

Fabricado en ABS

- Transparente
- Con capucha protectora hasta su uso.
- Para conectar a acceso venoso.

MODO DE EMPLEO DEL SISTEMA DE SUERO UNIDIX

- › Extraer del embalaje unitario manteniendo su esterilidad.
- › Cerrar el regulador de flujo.
- › Retirar la tapa protectora del punzón e insertar en el recipiente del fluido y colocar en suspensión.
- › En caso de que el recipiente sea rígido, abrir la toma de aire
- › Llenar la cámara de goteo hasta la mitad.
- › Abrir el regulador de flujo y purgar hasta expulsar todo el aire.
- › Cerrar de nuevo el regulador de flujo.
- › Retirar la tapa de la conexión macho luer-lock y conectar al acceso venoso.
- › Ajustar la velocidad de administración.

BENEFICIOS

- › Sistema resistente a lípidos y citostáticos, lo cual amplía el rango de uso y su administración. (Siga las indicaciones de seguridad de las guías y protocolos)
- › Una punción segura y más fácil en el recipiente gracias a las dos aletas que permiten posicionar los dedos y ejercer la fuerza necesaria.
- › Toma de aire tipo ventana para controlar su apertura y/o cierre según uso con recipiente rígido o flexible.
- › Toma de aire en distintivo azul para identificar rápidamente si se encuentra abierta o cerrada.
- › Filtro para partículas y bacterias tanto en la toma de aire como en la cámara previa al tubo a paciente.
- › Punto en Y que permite una administración externa puntual a través de una aguja sin necesidad de manipular la conexión a paciente y disminuyendo así la posibilidad de infección por conectar/desconectar las vías venosas.
- › Permite su uso durante procedimientos de RM ya que no contiene partes metálicas.
- › Apariencia totalmente transparente para visionado del interior tanto el fluido como posibles burbujas de aire. Fácil control de la purga.
- › Empaquetado recogido con una banda lo que permite una extracción controlada del producto y volcado en campo estéril más seguro.
- › Envase codificado por colores para su rápida identificación.
- › Material atóxico y apirógeno. 100% exento de látex y libre de DEHP. No contiene componentes de origen animal BSE/TSE.
- › Menor impacto ambiental; envases/embalajes con material reciclado y reciclable.

REFERENCIA, UNIDADES Y CÓDIGO DE BARRAS

Sistema de doble embalaje. Caja de transporte 200 unidades. Bolsas internas de 20u.

REFERENCIA	UNIDADES	EAN13
SS02	200	8432229280475

Fabricado para GRUPO UNIDIX en conformidad con la Directiva 93/42EEC. Producto Clase IIa. Carta de extensión conforme al Reglamento MDR (EU) 2017/745.

Acorde EN 1707:1997 acoplamiento dispositivos médicos, EN 13868 métodos de ensayo de acodamiento de tubos uso médico, EN ISO 8536-4:2013 equipo de infusión por gravedad de uso médico, ISO 10993 evaluación biológica de dispositivos médicos, ISO 11135-1 esterilización, ISO 14644 salas limpias y entornos controlados. Envasado y etiquetado acorde EN 980 EN 11607-1, EN 868-5, EN ISO 15223-1 y EN 1041.

EN ISO 13485:2012 sistemas de gestión de calidad.

GRUPO UNIDIX C/ Rivas, 27.
Teléfono: +34 91 776 53 63

Vicálvaro. 28052. MADRID
www.grupounidix.com
012025-7