

TENSIÓMETRO UNIDIX

Tensiómetro manual o esfigmomanómetro.

Sistema de brazalete inflable indicado para realizar la toma de tensión manual auscultatoria tanto domiciliaria como en centro sanitario.

Presenta dos tubuladuras separadas que terminan, respectivamente, en la bomba de inflado y en el manómetro.

Para realizar la medición de tensión arterial es habitual su uso junto a un fonendoscopio pero también se utiliza en otros procedimientos como torniquete.

Incluye una bolsa con cremallera.

Características Manómetro anerode

Fabricado en Aleación de Zinc

- Rango de medida: 0 a 300mmHg
- Graduada en 2 mmHg
- Variable admisible ± 3 mmHg
- Clip de sujeción



Características Manguito

Fabricado en Nylon

- Negro.
- Dimensiones: 50 x 14 cm
- Cierre mediante velcro.
- Indicativos de posición.

Características Pera/Bomba

Fabricada en PVC.

- Negro.
- Dispositivo para insuflar aire.
- Con válvula de flujo de aire giratoria.

MODO DE EMPLEO DEL TENSIÓMETRO UNIDIX

- › Asegurarse de que el manguito está totalmente desinflado.
- › Colocarlo sobre el tercio superior del brazo por encima del ángulo del codo unos 2cm situando las tubuladuras sobre la fosa cubital y con un ajuste que permita introducir 1 dedo entre la piel y el manguito de presión. El fonendoscopio se situará sobre la arteria.
- › Corroborar que la válvula de flujo de aire está cerrada y proceder a insuflar aire presionando la pera hasta 30mmHg por encima del momento de desaparición del pulso. No sobreinflar por encima de 300mmHg.

› Para la lectura de tensión, girar la válvula en sentido antihorario, ir liberando lentamente el aire y comenzar la auscultación del pulso. Atender siempre a la flecha del manómetro que indicará en la escala los mmHg correspondiente a la auscultación.

BENEFICIOS

- › Sistema de toma de tensión auscultatoria que abraza a más tipos de pacientes frente a algunos métodos oscilatorios.
- › Método de toma de tensión auscultatorio. Permite un amplio rango de actuación incluyendo pacientes con arritmias, preclampsia, diabetes frente a los métodos oscilatorios.
- › Sistema que permite la sujeción del manómetro y con ello un transporte y almacenaje más seguro.
- › Adaptación a las condiciones de la toma pudiendo posicionar el manómetro siempre dentro del campo visual gracias a su clip.
- › Visión clara y limpia de la escala de presión.
- › Indicativos de posición que permiten corroborar al profesional la correcta colocación.
- › La válvula de liberación de la presión siempre permanece conectada aunque se gire al máximo, evitando pérdidas de piezas importantes.
- › Bomba suave y muy flexible que facilita la tarea de inflado.
- › La bolsa de diseño compacto nos facilita el almacenaje del producto de forma segura y limpia.

REFERENCIA

Referencia	Medida
30111100	Pediatrico

Fabricado para GRUPO UNIDIX en conformidad con la directiva 93/42EEC. Producto Clase Im. Marcado CE 0197. Pruebas físicas acorde EN 1060-1. Aseguramiento de la calidad acorde EN 13485 e ISO 9001.

No exponer a altas/bajas temperaturas. Almacenar con toda la presión extraída. Para limpiar usar una tela húmeda, limpia y suave, no usar agentes químicos y no sumergir. Se recomienda recalibrar cada dos años.