


# + ALLEVYN<sup>®</sup> Sacrum

Apósito hidrocélular  
adhesivo

## Ficha Técnica

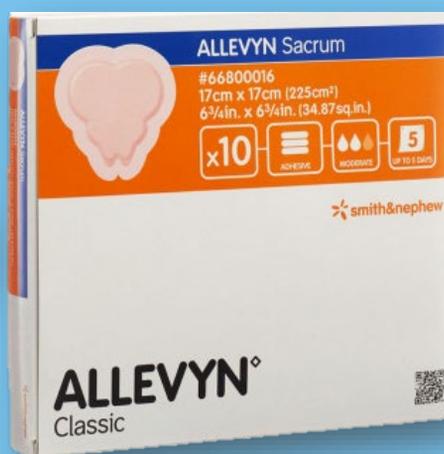

## + Ficha técnica ALLEVYN<sup>◇</sup> Sacrum

### Características

- Se ajusta perfectamente a la zona sacra.
- Adhesivo de alta tolerancia cutánea.
- No se adhiere la herida.
- Conformable, fácilmente adaptable a cualquier zona del cuerpo.
- Elevada capacidad de absorción gracias a su capa central.
- Promueve la cicatrización de la herida
- Bordes sellados y con forma redondeada, protege frente a fugas de exudado y proporciona mayor adaptabilidad.
- Película exterior impermeable, actúa como barrera bacteriana previniendo la contaminación de la lesión.
- Suave y acolchado, gran confort para el paciente.
- Puede permanecer en la lesión hasta 5 días, mínimos cambios de apósito.
- Fácil de usar y retirar.

### Descripción

El apósito ALLEVYN<sup>◇</sup> Sacrum con estructura trilaminar compuesto por una capa adhesiva en contacto con la herida, otra central hidrocélular suave y altamente absorbente y una externa permeable al vapor de agua que actúa de barrera bacteriana e impermeable, ofrece una barrera física contra líquidos, partículas y contaminantes microbianos.

### Composición

Componente	Composición
Película exterior	Film de poliuretano.
Capa central	Capa hidrocélular de poliuretano con PEG
Capa de contacto	Capa de poliuretano microperforada
Masa adhesiva	Acrílica

### Modo de acción

El sacro es la zona más usual para la formación de lesiones por presión. ALLEVYN<sup>◇</sup> Sacrum ha sido especialmente diseñado para adaptarse anatómicamente y facilitar el tratamiento de lesiones por presión, combinando con la probada eficacia de ALLEVYN Adhesive, sobre la zona sacra.

ALLEVYN<sup>◇</sup> Sacrum absorbe el exceso de exudado al mismo tiempo que mantiene un entorno húmedo adecuado para facilitar el proceso de cicatrización.

La elevada capacidad de absorción se debe a la capa central formada por hidrocélulas de poliuretano, y gracias al polietilenglicol que contiene, se consigue una rápida absorción inicial.

## + Ficha técnica ALLEVYN<sup>◇</sup> Sacrum

### Modo de acción

El exudado se absorbe primero por capilaridad y posteriormente por osmosis pasando el fluido desde los espacios intercelulares hacia el interior de las hidrocélulas.

La película exterior es un film impermeable que actúa como barrera bacteriana y a fluidos por lo que previene la lesión de posibles contaminaciones.

ALLEVYN<sup>◇</sup> Sacrum está especialmente diseñado para su utilización en lesiones que por su ubicación requieran un apósito adhesivo. El adhesivo se adhiere a la piel sana pero no al lecho de la herida y ha demostrado ser de bajo riesgo ante la irritación cutánea.

### Instrucciones de uso

1. Limpiar la herida según el protocolo clínico local
2. Seleccionar el tamaño de apósito adecuado
3. Limpiar la zona de aplicación, comprobando que la piel alrededor de la herida está limpia, seca y sin exceso de vello
4. Empezar retirando la primera parte del material protector del apósito ALLEVYN<sup>◇</sup> Sacrum. Colocar el extremo estrecho del apósito a un mínimo de 2 cm por encima del esfínter anal
5. Alisar el apósito sobre la zona sacra y terminar de quitar el material protector.

### Indicaciones

El apósito está indicado para el tratamiento de lesiones por presión en fase de granulación en zona sacra. Tratamiento por segunda intención de heridas en fase de granulación poco profundas. Heridas exudativas crónicas y agudas, heridas de espesor total y parcial como lesiones por presión, úlceras de pierna, úlceras de pie diabético, heridas malignas, heridas quirúrgicas, quemaduras de primer y segundo grado, zonas donantes, úlceras fúngicas. ALLEVYN<sup>◇</sup> Sacrum puede utilizarse en combinación con INTRASITE<sup>◇</sup> Gel para el tratamiento de heridas necróticas o con esfacelo. ALLEVYN<sup>◇</sup> Sacrum puede utilizarse en heridas infectadas. Cuando se utilice en heridas infectadas, estas deben tratarse según el protocolo clínico local.

### Cambios de apósito

En las etapas iniciales del tratamiento de la herida el apósito ALLEVYN<sup>◇</sup> Sacrum debe inspeccionarse según el protocolo clínico local sin embargo, debido a la posibilidad de mayor contaminación e infección que presenta esta zona podría ser necesario inspeccionar el apósito más frecuentemente.

Los apósitos se pueden dejar en el lugar de aplicación hasta 5 días dependiendo de la condición de la herida y la piel alrededor de la misma o hasta que el exudado sea visible y se aproxime a 0,5 cm del borde de la almohadilla del apósito, lo que suceda antes. La decisión de cuándo realizar el cambio dependerá de la evaluación clínica y de los protocolos locales, y debe hacerse bajo la supervisión de un profesional sanitario.

## + Ficha técnica ALLEVYN<sup>®</sup> Sacrum

### Retirada del apósito

Para retirar el apósito ALLEVYN<sup>®</sup> SACRUM, debe retirarse empezando en el borde superior y despegarse hacia abajo en dirección al ano para reducir al mínimo la posibilidad de contaminación fecal.

### Precauciones

- No utilizar el apósito ALLEVYN<sup>®</sup> Sacrum en combinación con agentes oxidantes, como soluciones de hipoclorito (p.ej; EUSOL) o peróxido de hidrógeno, ya que estos pueden destruir el componente de poliuretano absorbente del apósito.
- Al igual que otros productos adhesivos, puede ocasionar irritación y/o maceración de la piel alrededor de la herida. Se ha reportado casos infrecuentes de sensibilidad al apósito. Si se observa rojez o sensibilización, discontinuar el uso y consultar a un profesional sanitario
- ALLEVYN<sup>®</sup> Sacrum es un producto de un solo uso. Si se utiliza en más de un paciente, se puede producir contaminación cruzada o infección. Abrir el envase del apósito compromete la barrera estéril, por lo tanto, cualquier apósito no utilizado no debe guardarse para su posterior aplicación.

### Tamaño de apósitos

	Pequeño	Grande
Medida del apósito (cmxcm)	17 x 17 cm	22 x 22 cm
Medida máxima del área absorbente (cmxcm)	13,5 x 13,2 cm	18,5 x 18,1 cm
Superficie del apósito (cm <sup>2</sup> )	225 cm <sup>2</sup>	381,9 cm <sup>2</sup>
Superficie del área absorbente (cm <sup>2</sup> )	123,4 cm <sup>2</sup>	232 cm <sup>2</sup>

### Presentación

Código producto	Descripción	Unidades por envase	Unidad mínima de venta	Código EAN envase	Código nacional
66000451	ALLEVYN <sup>®</sup> SACRUM 22 cm x 22 cm	10	10	5000223426743	
66000700	ALLEVYN <sup>®</sup> SACRUM 17 cm x 17 cm	10	10	5000223441500	
66000694*	ALLEVYN <sup>®</sup> SACRUM 17 cm x 17 cm	3	3	5000223441531	489468

\*Reembolsable por la seguridad social

## + Ficha técnica ALLEVYN<sup>◇</sup> Sacrum

### Especificaciones técnicas

Capacidad de absorción:	mín. 35 g/100 cm <sup>2</sup>
Extensibilidad:	0,5 kgf/cm
Grosor:	0,4 cm
Permeabilidad al vapor de agua:	1000 – 3500 g/m <sup>2</sup> 24 hrs

### Resultados de ensayo Biotecnal ES-311.723 (EI)

	24 horas	48 horas
Capacidad de absorción y velocidad <small>Basado en UNE-EN 13726-1:2003</small>	0,4638 g/cm <sup>2</sup>	0,366 g/cm <sup>2</sup>
Capacidad de retención de exudado <small>Basado en UNE-EN 13726-1:2003</small>	5,83 g	4,60 g
Capacidad de evaporación <small>Basado en UNE-EN 13726-2:2003</small>	0,2 g/cm <sup>2</sup>	0,5 g/cm <sup>2</sup>

	Sentido 1	Sentido 2
Conformabilidad Biotecnal ES-311.723 (EI) <small>Basado en UNE-EN 13726-4:2003</small>		
Extensibilidad	5,7 N/cm	5,6 N/cm
Estiramiento permanente	0,2 %	0,4 %
Repelencia al agua (capacidad hidrófoba) Biotecnal ES-311.723 (EI) <small>Basado en UNE-EN 13726-3:2003</small>	Correcto	
Control del olor Biotecnal ES-311.723 (EI) <small>Basado en UNE-EN 13726-6:2003</small>	3,8 horas	
Barrera bacteriana* – seco Biotecnal ES-311.723 (EI) <small>Basado en UNE-EN ISO 22612</small>	Correcto (el producto actúa como barrera bacteriana)	
Barrera bacteriana – húmedo Biotecnal ES-311.723 (EI) <small>Basado en UNE-EN ISO 22610</small>	Correcto (el producto actúa como barrera bacteriana)	

# + Ficha técnica ALLEVYN<sup>◇</sup> Sacrum

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 2797 CE nº CE00356 Clase CE  IIb, estéril	El producto no contiene latex.		 3 Años     	 <b>Smith &amp; Nephew Medical Limited</b> Hull HU3 2BN England.  <b>Representante Europeo</b> Smith & Nephew Orthopaedics GmbH, Alemannenstraße 14, 78532 Tuttlingen, Germany  <b>Distribuidor</b> Smith & Nephew, S.A.U. ISO 9001