

Hematología

Tubos con EDTA BD Vacutainer®

Las sales de EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) se emplean como anticoagulante en muestras de sangre para test de hematología, ya que los componentes celulares se preservan particularmente bien en este medio.

El EDTA se asocia formando complejos con iones metálicos como el calcio, lo que inhibe la cascada de coagulación. El efecto anticoagulante del EDTA es irreversible.

La concentración de EDTA en los tubos BD Vacutainer® es de 1.8mg/mL de sangre, tal y como recomienda la ICSH (International Council of Haematology)¹. La sal recomendada de forma preferente por la ICSH es la dipotásica (K₂EDTA). Los tubos BD Vacutainer® están disponibles con K₂EDTA y K₃EDTA micronizado en las paredes del tubo.



Más información

Si lo desea, puede solicitar información técnica y/o clínica

Homogeneizado de tubos

Para evitar la formación de microcoágulos, mezcle los tubos de EDTA realizando 8-10 inversiones inmediatamente después de extraer la muestra de sangre

Tubos con K₂EDTA BD Vacutainer®

Nº Ref.	Volumen de vacío (mL)	Tamaño (mm)	Aditivo	Separador	Material	Etiqueta	Tapón	Color
368841	2.0*	13 x 75	K ₂ EDTA	Ninguno	PET	Papel	BD Hemogard™	
368274	2.0*	13 x 75	K ₂ EDTA	Ninguno	PET	Transparente	BD Hemogard™	
368843	2.0*	13 x 75	K ₂ EDTA	Ninguno	PET	Transparente	BD Hemogard™	
368856	3.0*	13 x 75	K ₂ EDTA	Ninguno	PET	Papel	BD Hemogard™	
368499	3.0*	13 x 75	K ₂ EDTA	Ninguno	PET	Transparente	BD Hemogard™	
362072	3.0*	13 x 75	K ₂ EDTA	Ninguno	PET	Papel	BD Hemogard™	
368861	4.0	13 x 75	K ₂ EDTA	Ninguno	PET	Papel	BD Hemogard™	
367862	4.0	13 x 75	K ₂ EDTA	Ninguno	PET	Transparente	BD Hemogard™	
366164	4.0	13 x 75	K ₂ EDTA	Ninguno	PET	Block	BD Hemogard™	
367864	6.0	13 x 100	K ₂ EDTA	Ninguno	PET	Papel	BD Hemogard™	
365900	6.0	13 x 100	K ₂ EDTA	Ninguno	PET	Transparente	BD Hemogard™	

1. International Council for Standardisation in Haematology and: Expert Panel on Cytometry, Recommendations of the International Council for the Standardisation in Haematology for Ethylenediaminetetraacetic Acid Anticoagulation of Blood for Blood Cell Counting and Sizing, Am J Clin Pathol 1993;100:371-372.

N° Ref.	Volumen de vacío (mL)	Tamaño (mm)	Aditivo	Separador	Material	Etiqueta	Tapón	Color
367941	6.0	13 x 100	K ₂ EDTA	Ninguno	PET	Block	BD Hemogard™	
367950	6.0	13 x 100	K ₂ EDTA	Ninguno	PET	Block	BD Hemogard™	
367525	10.0	16 x 100	K ₂ EDTA	Ninguno	PET	Papel	BD Hemogard™	

Todos los tubos vienen en bandejas de 100 / cajas de 1000

* Tubo de vacío reducido

Tubos con K₃EDTA BD Vacutainer®

N° Ref.	Volumen de vacío (mL)	Tamaño (mm)	Aditivo	Separador	Material	Etiqueta	Tapón	Color
367836	2.0*	13 x 75	K ₃ EDTA	Ninguno	PET	Block	BD Hemogard™	
368857	3.0*	13 x 75	K ₃ EDTA	Ninguno	PET	Block	BD Hemogard™	
362073	3.0*	13 x 75	K ₃ EDTA	Ninguno	PET	Block	BD Hemogard™	
368860	4.0	13 x 75	K ₃ EDTA	Ninguno	PET	Block	BD Hemogard™	
368270	4.0	13 x 75	K ₃ EDTA	Ninguno	PET	Transparente	BD Hemogard™	

Todos los tubos vienen en bandejas de 100 / cajas de 1000

* Tubo de vacío reducido