

Salvafix® Memory PRO – Cinturón

Descripción del producto

Cinturón Memory PRO de sujeción abdominal, para prevenir las auto-lesiones de los pacientes y las caídas de la cama o camilla, con sistema de cierre con apertura magnética. El cinturón incorpora dos bandas laterales cosidas que aumentan la seguridad y en todas las tallas (excepto XL) está articulado en la parte posterior. Por su construcción permite controlar el giro a derecha y/o izquierda así como la realización de cambios posturales. Incorpora una banda perineal y su misión es evitar que el paciente pueda liberarse deslizándose hacia abajo. El sistema de codificación alfanumérico Memory PRO (*), proporciona un sistema de colocación fácil y rápido y sirve para comprobar si las medidas abdominales del paciente sufren variación.



Código	Talla	Contorno Mín. / Máx.	Ancho
SVF3001	S	46 / 76 cm	16 cm
SVF3000	M	68 / 108 cm	18 cm
SVF3002	L	95 / 135 cm	18 cm
SVF3003	XL	115 / 150 cm	18 cm

Nombre comercial: Salvafix MEMORY PRO Cinturón
Fabricante: MEDI CARE SYSTEM, S.L.U.
Nº Patente(*): 10382112.0

Materiales

Fabricado en cintas de poliéster 100%, con refuerzo interior en zonas de mayor solicitud de esfuerzos. Ollados de acero inoxidable, colocados sobre taladrado por ultrasonidos. Ribete suave de poliéster 100% de color azul. El sistema de cierre consta de un pivote metálico de base plana de acero inoxidable y un botón cilíndrico amarillo de Policarbonato / ABS con mecanismo mecánico. Llave magnética con centrador para abrir el sistema de cierre que consta de un imán de neodimio cilíndrico insertado en una pieza azul de poliamida-6.

Composición: 100% Poliéster

Color: Crudo con ribete azul. Existe un código de colores en la etiqueta del producto para identificación de modelos y tallas: amarillo / talla S, azul / talla M, verde / talla L, rojo / talla XL

Características

Lavado: Lavado a máquina a temperatura máxima de 90°C
No usar lejía
Secar a máquina a temperatura moderada
No planchar



IMPORTANTE: Los botones de cierre nunca deben ser humedecidos ni sumergidos en líquidos. Utilizar siempre el cinturón junto a las barandillas laterales de la cama subidas.

Presentación: Bolsa de plástico conteniendo:
- 1 cinturón con 2 bandas laterales cosidas
- 1 banda perineal
- 3 sistemas de cierre (tallas L y XL 4 sistemas de cierre)
- 1 llave magnética
- Instrucciones de colocación e información de seguridad
Cajas de cartón reciclado con 3 unidades.



Declaración CE de Conformidad según el REAL DECRETO 1591/2009 (93/42 CE del Parlamento Europeo)