

BOLSA ORINA PIERNA 750 ml. - CAJA DE 30 UDS



INDICACIONES

Las bolsas de recogida de orina para pierna Corysan están indicadas para la recogida de orina diurna.

DESCRIPCIÓN

Capacidad aproximada de 750 ml.

Bolsa fabricada con dos láminas de cloruro de polivinilo soldadas con alta frecuencia.

Lámina frontal transparente con aspecto lechoso y escala graduada aproximativa.

Lámina trasera blanca, para mejor control visual de la orina.

Diseño con forma contorneada.

Con válvula de seguridad anti-retorno.

Con válvula de vaciado en cruz, para facilitar la apertura con una sola mano.

Tubo de admisión fabricado en cloruro de polivinilo de aspecto translúcido y longitud 50 cm.

Conector fabricado con cloruro de polivinilo blanco.

Funda o capuchón del conector fabricado con polietileno azul.

ACCESORIOS

Un juego de cintas elásticas con gemelos para sujeción a la pierna (1,9x39cm).

INSTRUCCIONES DE USO

Acoplar el conector del extremo del tubo a la sonda o al colector de pene.
En la parte superior e inferior de la bolsa hay orificios para colocar las cintas de sujeción.

PRECAUCIONES

Un solo uso. La reutilización de la bolsa puede producir riesgo de infección.
No estéril.
Este no es un producto con función de medición.
La bolsa debe ser vaciada en el WC antes de tirarla. Una vez vacía, descartar en la basura.
No contiene látex.
No aplastar, pinzar o colapsar el tubo durante la utilización del producto para evitar restringir el flujo de la orina hacia la bolsa.

CONSERVACIÓN

Almacenar en lugar seco y fresco, alejado de toda fuente de calor.

NORMATIVA

Producto sanitario de **Clase I**, no estéril. Cumple los requisitos esenciales establecidos en el Anexo I y Anexo VII del Real Decreto 1591/2009 de octubre, transposición de la Directiva Europea 93/42/CE de 14 de junio de 1993, por la que se regulan los Productos Sanitarios.

FABRICANTE

Corysan S.A.