



DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL LISTO PARA USAR

OPASTER ANIOS BANDELETES OPASTER ANIOS

DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA PRODUCTOS SANITARIOS

- Listo para usar
- Amplio espectro microbiológico
- Control del baño de inmersión mediante el uso de una tira de control
- Estabilidad del baño de inmersión: 14 días




OPASTER'ANIOS

Desinfectante de alto nivel para productos sanitarios

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Solución azul transparente
- Activo frente a Clostridium difficile
- Solución de 0,55% orthoftaldehído tamponada a pH 8
- Amplia compatibilidad con todo tipo de materiales

INSTRUCCIONES DE USO

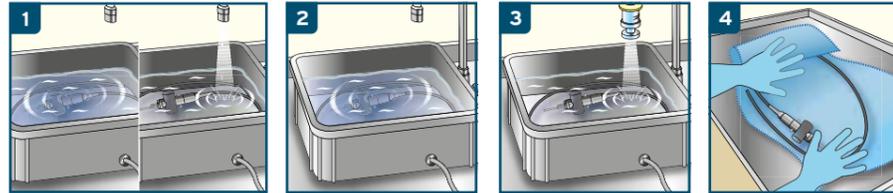

1 Fase de pre-desinfección: Limpiar el producto sanitario con un detergente o un producto pre-desinfectante. Enjuagar abundantemente. Para el material de endoscopia: cepillar los canales.

2 Fase de desinfección: Vierta la solución. Respetar un tiempo de contacto mínimo de 5 minutos. Mantener el baño de inmersión cubierto durante el tiempo de contacto. Para el material de endoscopia: recircular la solución por el interior de los canales. No añadir ningún producto en el OPASTER'ANIOS.

3 Enjuague abundantemente con agua estéril o filtrada (0,2 µm) para eliminar cualquier resto de producto. Para el material de endoscopia: enjuague las partes internas y externas del producto sanitario.

4 Secar con una toallita de uso único. Mantener el instrumental de la forma más asépticamente posible hasta su próxima utilización para garantizar la eficacia del desinfectante.

Compruebe el nivel de orto-ftalaldehído con una tira de prueba de OPASTER'ANIOS al inicio de la sesión, al recomenzar después de una interrupción y por lo menos una vez al día. Conservación máxima en el baño de inmersión: 14 días.

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

CONDICIONES	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida* según EN 13727/EN 14561	5 min
Levuricida* según EN 13624/EN 14562	5 min
Fungicida* según EN 13624/EN 14562	5 min
Tuberculicida* según EN 14348/EN 14563	5 min
Micobactericida* según EN 14348/EN 14563	5 min
Activo en virus encapsulados* según EN 14476/EN 17111	5 min
Virucida* según EN 14476/EN 17111	5 min
Esporicida* según EN 17126	30 min

*=condiciones de limpieza

EMBALAJE Y INFORMACIÓN DE PEDIDO

PRODUCTO	EMBALAJE	REFERENCIA
Opaster'Anios	4 x Envases de 5 L	3115360
Opaster'Anios	Tiiras de control (1 envase 50 tiras)	3133954

CE
0459

ÁREA DE APLICACIÓN

Desinfectante de alto nivel para productos sanitarios: material quirúrgico y médico, material de endoscopia y material termosensible.

INSTRUCCIONES DE USO

Solución lista para usar. No diluir. Limpiar y enjuagar minuciosamente el producto sanitario antes de sumergirlo en OPASTER'ANIOS.

- 1. Fase de pre-desinfección:** Limpiar el producto sanitario con un detergente o un producto pre-desinfectante. Enjuagar abundantemente. Para el material de endoscopia: cepillar los canales.
- 2. Fase de desinfección:** Vierta la solución. Respetar un tiempo de contacto mínimo de 5 minutos. Mantener el baño de inmersión cubierto durante el tiempo de contacto. Para el material de endoscopia: recircular la solución por el interior de los canales. No añadir ningún producto en el OPASTER'ANIOS.
- 3. Enjuague** abundantemente con agua estéril o filtrada (0,2 µm) para eliminar cualquier resto de producto. Para el material de endoscopia: enjuague las partes internas y externas del producto sanitario.
- 4. Secar** con una toallita de uso único. Mantener el producto sanitario lo más aséptico posible para garantizar la eficacia del desinfectante.

Compruebe el nivel de orto-ftalaldehído con una tira de prueba de OPASTER'ANIOS al inicio de la sesión, al recomenzar después de una interrupción y por lo menos una vez al día. Conservación máxima en el baño de inmersión: 14 días.

INGREDIENTES

Solución de orto-ftalaldehído (0,55%) en medio regulado, colorante, perfume.

ALMACENAMIENTO

Peligroso- respetar las precauciones de uso (descritas según las normas Europeas en relación a la clasificación y etiquetado de los productos químicos). Almacenar entre +5°C y +25°C.

CERTIFICACIÓN

Producto sanitario. La actividad antimicrobiana completa de Opaster'Anios se recoge en el dossier científico del producto, disponible bajo demanda.

PRODUCTO SANITARIO. USAR DE FORMA SEGURA

Por favor lea la etiqueta y la información del producto.



PARA USO PROFESIONAL.

BANDELETTES OPASTER ANIOS (Tiras)

INDICACIONES

50 tiras de control del índice de orto-ftalaldehído en la solución de OPASTER'ANIOS.

MODO DE EMPLEO

- Mojar la tira durante un segundo, eliminar el exceso de líquido dando unos golpecitos en el borde del cuadrado reactivo sobre papel absorbente
- Lectura tras 60 segundos:
Rosa uniforme - CONFORME
Rosa no uniforme - NO CONFORME
- No interpretar un resultado antes de 60 segundos (1 minuto) tras inmersión
- Para la frecuencia de uso, consulte las instrucciones de la etiqueta de OPASTER'ANIOS

ALMACENAMIENTO

Volver a cerrar el tubo tras haber sacado una tira. Conservar protegido de la humedad. Respetar la fecha límite de uso indicada en la etiqueta. Conservar 90 días tras su apertura. Almacenar entre 5°C y 25°C.

PRECAUCIONES DE USO

Eliminar el producto y su recipiente tomando todas las precauciones de uso. Uso reservado a los profesionales.

CE

REPROCESADO DEL INSTRUMENTAL

LECTURA TRAS 60 SEGUNDOS


Conforme

Rosa uniforme



No conforme

Rosa no uniforme

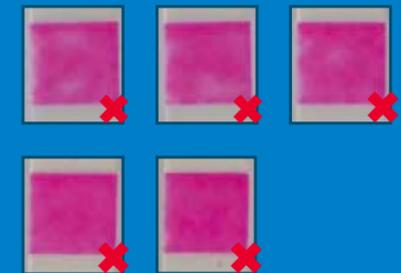

PARA USO PROFESIONAL.



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuido por:
ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, S.L.
Avinguda del Baix Llobregat n^os. 3-5
Sant Joan Despí-08970

ECOLAB[®]
PROTECTING WHAT'S VITAL[™]