

ESPARADRAPO DE GASA CPK ROLL FIX

CPK ROLL FIX

Clasificación (RPS (UE) 2017/745): Clase I

Nº Organismo notificador CE: -

Fabricante: FARMABAN, s.a.



DESCRIPCIÓN

CÓDIGO	MEDIDAS	CODIGO EAN 13	UNIDAD DE VENTA
1444	2,5 cm x 10 m	8 4280 12 51444 5	110
1445	5 cm x 10 m	8 4280 12 51445 2	64
1446	10 cm x 10 m	8 4280 12 51446 9	32
1447	15 cm x 10 m	8 4280 12 51447 6	20
1448	20 cm x 10 m	8 4280 12 51448 3	16
1449	30 cm x 10 m	8 4280 12 51449 0	10

1. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

La unidad de CPK ROLL FIX está constituida por:

- ☐ Tejido sin tejer blanco 100% poliéster.
- ☐ Masa adhesiva de caucho sintético, sin látex y sin colofonia.
- ☐ Papel protector siliconado.
- ☐ Centro de polietileno de alta densidad o similar.

2. ENVASADO

2.1 Envase principal

☐ Caja de cartón blanco impresa.

2.2 Envase secundario

☐ Caja de cartón corrugado.

3. DESCRIPCIÓN

La lámina de tejido no tejido es una lámina adhesiva microporosa constituida por un soporte de tejido sin tejer blanco 100% poliéster impregnado por una de sus caras con un adhesivo de caucho sintético protegido mediante papel siliconado. La lámina se presenta enrollada en un centro y disponible en diferentes anchos.

4. PROPIEDADES

La lámina de tejido no tejido no produce irritaciones y es biocompatible por lo que puede utilizarse para pieles sensibles. A su vez es fácil de aplicar y se adapta perfectamente a los diferentes contornos corporales sin limitar el movimiento proporcionando seguridad y confort.

La elasticidad del material se acentúa mediante las microperforaciones. Presenta una elevada adhesividad, inicial y permanente.

Es permeable al aire y al vapor de agua, por lo que evita la maceración de la piel.

Puede cortarse al tamaño adecuado para múltiples usos y la cobertura completa de la lámina adhesiva reduce los riesgos de contaminación.

No contiene látex.

5. INDICACIONES

CPK ROLL FIX está indicado para la fijación de apósitos, particularmente en articulaciones o partes del cuerpo contorneadas o con movimiento, y para la fijación de cánulas, tubos, catéteres y drenajes.

6. CONTRAINDICACIONES

No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes.

7. PRECAUCIONES

Producto para un solo uso.

Aplicar siempre sobre la piel limpia y seca.

No debe ser aplicado bajo tensión.

No aplicar sobre heridas abiertas.

8. CADUCIDAD

3 años almacenado en lugar fresco (entre 5°C y 30°C), seco y protegido de la luz solar en su envase original.

FABRICANTE

FARMABAN