

# PURILÓN GEL



## Descripción de producto

**Purilon® es un hidrogel suave elaborado con ingredientes naturales sin ningún aditivo. Está indicado para heridas que requieren un desbridamiento efectivo y delicado del tejido necrótico, lo que facilita una cicatrización más rápida de la herida.**

## Combinación única de propiedades hidratantes y absorbentes

La combinación de propiedades hidratantes y absorbentes (1) promueve el proceso natural de desbridamiento autolítico y la cicatrización de la herida en ambiente húmedo (2).

## Fácil de aplicar

El aplicador asegura una aplicación controlada, fácil y aséptica utilizando una sola mano. El gel puede retirarse mediante enjuague.

## Minimiza la filtración y la maceración

La textura viscosa del gel permite que se mantenga en su posición: incluso después de la absorción de los residuos y del exudado, el gel conservará su cohesión y contrarrestará la filtración y la maceración.

## Modo de acción

Purilon gel ® hidrata el tejido necrótico y absorbe el exceso de exudado, la descamación y los residuos de la herida.

### **Composición**

Purilon gel ® está elaborado con agua purificada, carboximetilcelulosa sódica y alginato de calcio. Purilon gel® es un producto muy suave, dado que el gel está elaborado con ingredientes naturales sin ningún aditivo.

### **Uso**

Purilon gel ® está indicado para las heridas necróticas secas y con desprendimiento, así como para las heridas con una mezcla de tejido necrótico y granuloso, como úlceras de pierna, úlceras por presión, úlceras de pie diabético no infectadas, y puede utilizarse para quemaduras de primer y segundo grado. El gel puede aplicarse durante todo el proceso de cicatrización, a fin de procurar un ambiente húmedo de cicatrización. Purilon gel® debe utilizarse junto con un apósito secundario.