

BIATAIN ADHESIVE SACRO APOSITO ESTERIL



Composición

Espuma de poliuretano hidrofílico, adhesivo hidrocoloide y un film semipermeable.

Descripción

Apósito hidropolimérico estéril. Específicamente indicado para su utilización en el sacro, por su forma, que favorece una: -Mejor adaptabilidad al contorno del glúteo. -Mayor adaptación anatómica al pliegue interglúteo. -Amortigua y protege suavemente.

Indicaciones

Indicado en úlceras localizadas en el sacro.

Modo de empleo

Elegir el tamaño de apósito que sobrepase 1 ó 2 cm la piel perilesional. - La parte no impresa del apósito, se situará en contacto con la lesión, quedando la parte impresa a la vista. - Utilizar las pestañas para asegurar una aplicación aséptica. - Aplicar el vendaje que esté indicado, puede ser cubierto con vendaje compresivo si es preciso. - Debe cambiarse cuando esté clínicamente indicado o cuando el exudado se aproxime 2 cm al borde del apósito. - Puede mantenerse hasta un máximo de 7 días. Pueden ser utilizados en úlceras infectadas, bajo supervisión médica.

Contraindicaciones

No usar con soluciones que contengan hipocloritos o peróxido de hidrógeno.