


## Ficha Técnica:

### Comfeel®

Comfeel Plus Transparente

Apósito Hidrocoloide Transparente

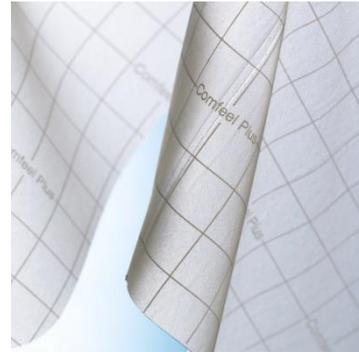

### 1. Descripción

Comfeel Plus Transparente es un apósito de hidrocoloide transparente que absorbe el exudado y crea un gel suave que mantiene el medio ambiente húmedo en la lesión. Es un apósito semipermeable, y posee una suave adhesividad sobre la piel sana.

### 2. Indicaciones

Comfeel Plus Transparente está indicado en lesiones con un nivel de exudado de bajo a moderado. Resulta especialmente útil en las siguientes lesiones:

- Cicatrización final de heridas superficiales (heridas quirúrgicas, quemaduras de 2º grado, zonas donantes, dermo-abrasiones)
- Úlceras vasculares y úlceras por presión en los últimos estadios de cicatrización.
- Para protección y prevención de lesiones por fricción.
- Para protección de las lesiones en su evolución final.
- En procesos de cicatrización que precisen un contacto visual.
- Para fijación de catéteres.


Además de lo anterior, Comfeel Plus Transparente puede utilizarse como apósito secundario por encima de, por ejemplo, un apósito de alginato.

### 3. Composición

Capa absorbente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carboximetilcelulosa sódica (hidrocoloide)</li> <li>• Elastómero artificial</li> <li>• Espesantes y plastificantes</li> </ul>
Cubierta semipermeable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Film de Poliuretano hidrofílico. Permeable a gases</li> </ul>


## 4. Modo de Acción

Comfeel Plus Transparente ha sido diseñado para crear un medio ambiente húmedo óptimo en lesiones con exudado de bajo a moderado. Ha sido una prioridad crear un apósito fácil de utilizar, cómodo y que permite espaciar las curas.

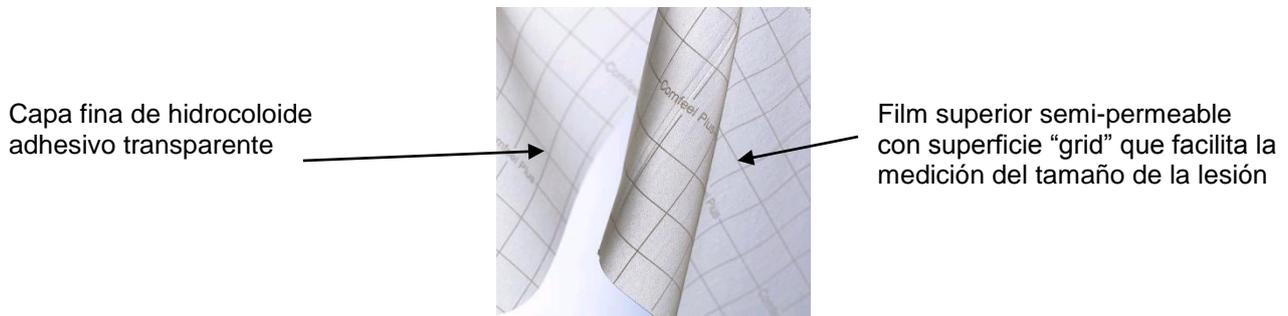

### 4.1 Creación de medio ambiente húmedo

Cuando Comfeel Plus Transparente se aplica sobre la lesión, el apósito se adhiere a la piel sana y seca (fig. 1). En contacto con el exudado, las partículas de hidrocoloide absorben el exudado y crean un gel suave que mantiene el medio ambiente húmedo en la lesión (fig. 2). En lesiones en fase de granulación o epitelización la humedad favorece la cicatrización, mientras que en lesiones con tejido no viable favorece el desbridamiento.

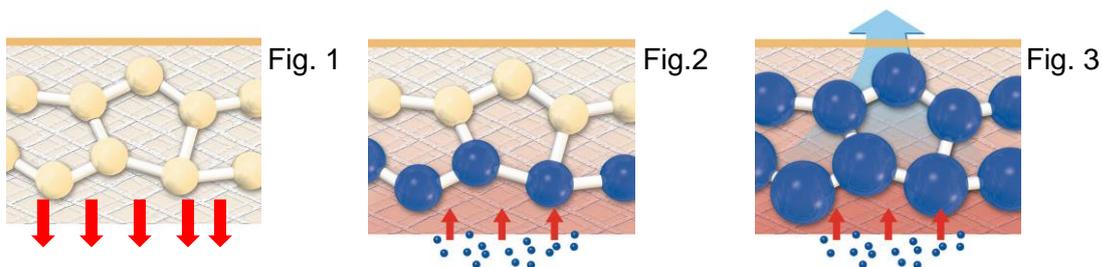

### 4.2 Evaporación selectiva

El film superior del apósito es semi-permeable: Es impermeable a líquidos y agentes contaminantes, pero permeable a gases. Eso significa que el apósito favorece la evaporación del exceso de exudado (fig. 3). De esta manera, se mantiene el medio ambiente húmedo y se aumenta el tiempo de permanencia del producto. Estudios independientes han demostrado que Comfeel Plus Transparente permite una mayor capacidad de evaporación que otros apósitos similares.

### 4.3 Apósito Transparente

La transparencia del apósito permite realizar un control visual de la lesión sin levantar el apósito. De esta manera se puede aumentar el tiempo de permanencia del apósito, minimizando así las molestias y cambios de temperatura causadas en los cambios de apósito.



### 4.4. Fácil aplicación y retirada

El apósito viene preparado con solapas de aplicación que permiten una colocación fácil y en condiciones estériles. Se puede apreciar visualmente el grado de saturación del apósito, lo cuál ayuda a determinar el momento de cambiar el apósito. Además, Comfeel Plus Transparente, es un apósito muy flexible que se puede recortar, lo cuál facilita su utilización en zonas de movilidad.

## 5. Modo de aplicación:

		<p>Tras la limpieza de la lesión, utilice las pestañas para asegurar una aplicación aséptica.</p> <p>Retire el papel protector.</p>
		<p>Aplique la zona adhesiva sobre la zona a tratar. Retire las lengüetas.</p> <p>El producto debe cambiarse cuando esté clínicamente indicado o cuando el exudado se aproxime a los bordes del apósito.</p>

## 6. Ventajas del producto:

- **Transparencia**
  - **Comfeel Plus Transparente** permite mantener un control visual de la lesión sin levantar el apósito<sup>2</sup>.
- **Flexibilidad y Adaptabilidad**
  - El apósito es flexible y recortable lo cuál facilita su colocación en lesiones en zonas de movilidad.
- **Control del exudado – medio ambiente húmedo**
  - En contacto con el exudado, las partículas de hidrocoloide absorben el exudado creando un gel suave que mantiene la humedad en el lecho ulceral. La humedad favorece la cicatrización.
  - Comparado con otros apósitos finos de hidrocoloide, Comfeel Plus Transparente ofrece una mayor capacidad de evaporar el exceso de exudado y una mayor capacidad de controlar el exudado<sup>1</sup>.
- **Protección frente a agentes contaminantes**
  - El film superior semipermeable protege la lesión frente a bacterias y otros agentes contaminantes.
- **Protege frente a fricciones:**
  - En zonas expuestas a fricciones, Comfeel Plus Transparente funciona como una segunda piel que previene la aparición de lesiones por fricción
- **Fácil de usar<sup>2</sup>**
  - Apósito transparente: Permite el control visual de la lesión<sup>2</sup>.
  - El apósito incorpora un indicador de saturación que ayuda al profesional a determinar el momento preciso de cambiar el apósito.
  - El apósito incorpora una superficie “grid” que facilita la medición y seguimiento del tamaño de la lesión.
  - Sistema de aplicación estéril.

## 7. Referencias

1. Thomas, S. et al; An ‘in-vitro’ comparison of the physical characteristics of hydrocolloids, hydrogels, foams, and alginate/cmc fibrous dressings, [www.dressings.org](http://www.dressings.org) 2005. Vol. May.
2. Goodhead,A; Clinical efficacy of Comfeel Plus Transparent Dressing, *British Journal of Nursing* 2002. Vol. 11 (4) p. 282-287.

## 8. Presentación:

**Envasado:** Envase unitario estéril con etiquetado en el que figura:

- Denominación del artículo
- Método de esterilización
- Fecha de caducidad
- Referencia comercial
- Número de lote
- Nombre del fabricante

**Almacenaje:** Temperatura ambiente de 10 a 25 grados

**Método Esterilización:** Radiaciones Beta

**Garantía de calidad:** Con Marca CE  
Libre de látex

**Presentaciones:**

Nombre	Tamaño	Presentación	Código Nacional	Referencia fabricante
<b>Comfeel Plus Transparente</b>	<b>5 x 7 cm.</b>	<b>C/ 3 U</b>	<b>467142</b>	<b>3530*</b>
	<b>10 x 10 cm.</b>	<b>C/ 3 U</b>	<b>476697</b>	<b>3533*</b>
	<b>9 x 14 cm.</b>	<b>C/ 3 U</b>	<b>467159</b>	<b>3536*</b>
	<b>15 x 15 cm.</b>	<b>C/ 3 U</b>	<b>467597</b>	<b>3539*</b>
	<b>20 x 20 cm.</b>	<b>C/ 3 U</b>	<b>164764</b>	<b>3545</b>
	<b>5 x 25 cm.</b>	<b>C/ 5 U</b>	<b>476705</b>	<b>3548</b>
<b>Comfeel Plus Sacro Transparente</b>	<b>17 x 17 cm.</b>	<b>C/ 3 U</b>	<b>488114</b>	<b>3586*</b>

\* Presentación financiada por el Sistema Nacional de Salud