



FICHA TÉCNICA

Artículo: Alterna® Confort - Bolsas de Urostomía Multicanal de 3 piezas

Marca Comercial: Alterna® Confort - Bolsas de Urostomía Multicanal de 3 piezas

Referencias:

Alterna®
Confort



Adhesivo
Swiss Roll
Transparente
Duración Ex-
tra Flexi-
ble

Producto	Tamaño	Aro	Código Nacio- nal	Refe- rencia	Estoma mm
Transpa- rente	Maxi	40 mm	400109	17945	10-35
		50 mm	400110	17946	10-45
		60 mm	400111	17947	10-55
Traslú- cida	Midi	40 mm	400107	17943	10-35
		50 mm	400108	17944	10-45
	Maxi	40 mm	400112	17940	10-35
		50 mm	400113	17941	10-45
		60 mm	400114	17942	10-55

Productos reembolsados por el SNS

Presentación: 30 bolsas + 7 discos Swiss Roll Transparente Extra Flexibles + 1 tubo corrugado

Contenido

Indicaciones:	2
Descripción del sistema de 3 piezas:.....	2
Descripción de los discos adhesivos Alterna® Confort	2
Descripción componentes de la bolsa:.....	4
El sistema de enganche mecánico denominado Clíper de seguridad.....	4
Colocación de la bolsa sobre el disco adhesivo	5
Tecnología multicanal y forma anatómica	5
La válvula anti reflujo	5
La válvula de vaciado y tapón estriado.....	5
El plástico.....	5
La cubierta suave.....	6
Bolsillo en bolsas traslúcidas.....	6
Tubo Corrugado.....	6
Características específicas por referencia:	6
Resumen del material y su composición:	7



Medidas / Dimensiones:.....8

Envasado:8

Indicaciones:

Alterna® Confort – Bolsa de urostomía multicanal de 3 piezas, con cliper de seguridad, está indicado para recoger la orina procedente de una urostomía, en pacientes urostomizados que deseen disponer de un dispositivo que le aporte seguridad y protección a la vez que una alta flexibilidad y máxima discreción. El cliper emite un sonido audible que confiere una seguridad extra indicando que el sistema está correctamente acoplado.

La bolsa incorpora tecnología multicanal que consiste en cinco canales que distribuyen la orina de forma uniforme, lo que confiere una máxima discreción y permite reducir el abultamiento de la bolsa y disminuir el ruido producido por el movimiento de la orina

El disco puede permanecer en la piel varios días, mientras que la bolsa se puede cambiar con la frecuencia que se precise.

Descripción del sistema de 3 piezas:

El producto consiste en un dispositivo de tres piezas, formado por: Bolsa multicanal, Disco Swiss Roll Transparente Extra Flexible y un Cliper de seguridad. Está diseñado para recoger la orina procedente de una urostomía.

Respecto a la bolsa **Alterna® Confort**, está abierta en su parte inferior, por lo que se podrá vaciar cada vez que se llene, e incorpora una válvula de vaciado para permitir el vaciado de la misma y válvula anti reflujo que evita el retorno de la orina, eliminando el riesgo de infección e irritación.

Además, dispone de: una bolsa multicanal mejorada con cubierta suave de tela sin tejer altamente resistente de color blanco y plásticos mejorados y un enganche mecánico denominado cliper de seguridad. La bolsa está diseñada anatómicamente con el fin de adaptarse a la forma del cuerpo.

Las bolsas se enganchan sobre los **Discos Adhesivos Alterna® Confort** Swiss Roll Transparente Extra Flexibles que han sido diseñados específicamente para este fin.

Entre los beneficios que aportan las bolsas de urostomía multicanal de 3 piezas abiertas **Alterna® Confort** con Cliper de seguridad, esta la característica de **poder reposicionar la bolsa** sobre el disco para corregir su ubicación sin tener que separar la bolsa del disco, de esta manera se puede posicionar la bolsa adaptándose a las necesidades del paciente, como por ejemplo al tumbarse o al ponerse de pie. Además, el sistema de 3 piezas Alterna® Confort, confiere una gran seguridad extra al hacer un sonido audible al cerrar el cliper de la bolsa sobre el aro plástico de la bolsa, lo que aporta una seguridad extra al paciente de que el sistema está perfectamente encajado

Descripción de los discos adhesivos Alterna® Confort

Los discos Alterna® Confort 3 piezas para urostomías con tecnología Extra Flexibles, están formados por un adhesivo Swiss Roll Transparente Extra Flexible para urostomías. Esta tecnología única en el mercado, ha permitido contar con un dispositivo que se adapta a las necesidades del paciente urostomizado, proporcionándole la seguridad y protección cutánea deseada y evitando el desarrollo de numerosos problemas cutáneos.



El adhesivo, sella de forma activa y eficaz el estoma, adaptándose como una segunda piel. Combina varias resinas sintéticas dispuestas en dos zonas diferentes: la zona central está formada por dos resinas de propiedades complementarias que al contacto con la humedad se hincha y adquiere una consistencia de gel, sellando de manera efectiva el estoma. Y una segunda zona periférica formada por una tercera resina transparente que permite visualizar la piel adaptándose como una segunda piel.

El adhesivo en espiral es, por tanto, una mezcla de resinas mixta de última generación, denominada Swiss Roll Transparente Extra Flexible, formada por tres resinas. Estas resinas están dispuestas del siguiente modo:

**Parte interior del adhesivo (zona en espiral):**

En la parte central dos resinas están dispuestas a modo de espiral concéntrica. La resina blanca tiene una mayor cantidad de polímeros SIS que favorecen la adhesividad, mientras que la resina marrón tiene mayor cantidad de hidrocoloides que por su elevado poder de absorción, aportan una elevada protección cutánea. Además, la resina marrón contiene pectina e hidroxietilcelulosa para la absorción de humedad. Y un almidón natural (almi-

dón de la patata) se ha añadido en pequeñas cantidades para estabilizar la absorción.

Ambas resinas contienen SIS (copolímero de estireno-isopreno-estireno) plastificado con aceite DOA y con una resina añadida para aumentar la adhesión.

Ambas resinas están formuladas para tener muy alta cohesión y una gran capacidad de absorción de la humedad, para garantizar una alta resistencia al efluente.

**Parte exterior del adhesivo:**

El borde exterior del adhesivo está formado por un adhesivo transparente e incoloro. Se basa en una goma sintética (goma de butilo) y PIB (poliisobutileno) al que se ha añadido una resina para potenciar la adhesividad. Además, este adhesivo contiene hidroxietilcelulosa como absorbente de humedad y almidón de patata para la estabilización.

El adhesivo está formulado para tener una alta cohesión y al mismo tiempo ser capaz de adaptarse rápidamente a la piel después de la aplicación.

El adhesivo está biselado, con mayor grosor en el centro para una mayor absorción y más fino en la periferia para una mejor adaptabilidad.

Características únicas del adhesivo en espiral Swiss Roll Transparente Extra Flexible para urostomía:

- Seguridad comprobada Se adhiere firmemente a la zona periestomal, siendo indoloro en su retirada. Es muy resistente a la erosión, por lo que evita que el adhesivo se deshaga protegiendo la piel contra la irritación.
- Altamente protector para la piel.
- Mantiene el equilibrio del PH de la piel, asegurando una piel sana y saludable. La alternancia de resinas es buena para la piel. Gracias a su composición única con gran cantidad de hidrocoloides, absorbe totalmente la humedad, lo que le permite que la piel no se macere y transpire.
- Flexibilidad aumentada, lo que aporta un mayor confort al paciente.



El adhesivo tiene **seis zonas Flex** en el borde del adhesivo, que mejoran la adaptación al movimiento del cuerpo:

- Adaptación perfecta entorno al abdomen.
- Multiplican la flexibilidad.
- Mejor adherencia de los bordes al cuerpo.
- Más seguridad al adaptarse mejor a los movimientos del cuerpo.


Estas zonas Flex no deben recortarse, para que se mantenga la cohesión de los polímeros SYS, ya que su función es permitir una mayor adaptación al abdomen en el borde del adhesivo, haciendo que el disco adhesivo vaya con los movimientos del abdomen del paciente.

Film en la parte superior

Película superior nacarada de última generación (ubicada en la cara opuesta a la parte adhesiva que contacta con la piel). Esta película plástica de última generación, le proporciona una alta flexibilidad. Al mismo tiempo le confiere al disco adhesivo una alta protección frente al efluente. El film de la parte superior está compuesto de EVA (Etil-vinil-acetato). Este film superior proporciona por tanto al usuario final una sensación de mayor flexibilidad del conjunto del producto, siendo más confortable su uso diario.

En resumen, es un adhesivo que proporciona una alta adhesividad y adaptabilidad con excelente protección cutánea.

El disco adhesivo incluye:

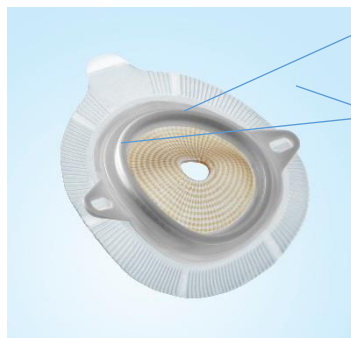

➤ **Aro plástico**, flexible y en conjunto con la bolsa resulta más sencillo de acoplar, al tener que imprimir menos fuerza con los dedos.

➤ **Presillas para cinturón**. Las presillas están en el mismo disco, esto facilita los cambios de bolsa, ya que no es necesario retirar el cinturón y el disco para cambiar la bolsa. El disco permanece en la zona periestomal junto al cinturón (en caso de haberlo empleado) y directamente sobre él se cambia la bolsa correspondiente.

Descripción componentes de la bolsa:

El sistema de enganche mecánico denominado Clíper de seguridad

Se trata del **único sistema de tres piezas** con enganche mecánico y clic audible del mercado. Este **sistema único** permite reducir los cambios del adhesivo, disminuyendo la incidencia de trauma mecánico, proveyendo la libertad de cambiar el tipo de bolsa y tamaño frecuentemente.

Sonido clic. El sistema proporciona un **clic audible que refuerza la sensación de seguridad** al ser garantía audible del enganche de la bolsa al disco.

Este sistema de clíper de seguridad es ideal para todos tipos de abdomen: Normal, Invaginado o Eventrado (hernia)



Seguridad del enganche mecánico. Su forma de aplicación es suave. Minimiza la presión en el abdomen gracias al acoplamiento suave de la bolsa al disco.



Colocación de la bolsa sobre el disco adhesivo



El disco adhesivo Alterna® Confort se coloca directamente sobre la piel, ajustándolo al tamaño del estoma y una bolsa se acopla sobre éste, asegurando su unión a través de un tercer elemento denominado cliper de seguridad.

Al colocar la bolsa sobre el disco, el sistema permite posicionar la bolsa acorde a las necesidades del paciente ostomizado. Una vez elegida la posición mediante el cliper de seguridad se cierra el sistema.

Tecnología multicanal y forma anatómica

La bolsa incorpora **tecnología multicanal** que consiste en 5 canales que distribuyen la orina de forma uniforme, lo que confiere una **máxima discreción** y permite **reducir el abultamiento de la bolsa y disminuir el ruido producido por el movimiento de la orina**.

La bolsa es más ancha en la parte inferior, evitando que se gire sobre sí misma y bloqueando el paso de orina.

La bolsa no presenta picos ni esquinas que produzcan estancamiento de la orina, adaptándose al contorno corporal.



La válvula anti reflujo

La bolsa dispone de una válvula anti reflujo que evita el retorno de la orina, eliminando el riesgo de infección e irritación.

La válvula de vaciado y tapón estriado



Posibilita el vaciado de la bolsa, dispone de un tapón estriado, que va unido a la válvula de vaciado para evitar su pérdida. El tapón es estriado realizando un cierre estanco del sistema. Además, es flexible, lo que permite dirigir la orina en su vaciado y suave al tacto.

El plástico

El plástico de las bolsas está formado por las siguientes cinco capas: EVA, EVA, PVdC, EVA y EVA. La capa de PVdC es la capa protectora, cuyo principal propósito es mantener los olores dentro de la bolsa.

Beneficios funcionales:

- Plástico a prueba de olor.
- Muy silencioso.
- Resistente a la orina.
- Propiedades antifugas.



La cubierta suave

La cubierta suave de las bolsas consiste en una tela sin tejer de polipropileno de color blanco, altamente resistente.

Las bolsas transparentes referencias: 17945, 17946, 17947 llevan cubierta suave en su cara interna.

Las bolsas traslúcidas referencias: 17943, 17944, 17940, 17941, 17942 disponen de cubierta suave tanto en su cara interna como en la externa.

La cubierta suave se ha adherido en la parte inferior alrededor del adhesivo, para evitar que con el movimiento el plástico entre en contacto con la piel. Además de esta manera resulta más difícil que pueda rasgarse o romperse con el uso.

Beneficios funcionales de la cubierta suave:

- La cubierta suave impide el contacto de la piel con el plástico.
- Aporta suavidad al tacto y comodidad durante el uso.
- No hace ruido.
- Repele el agua por lo que tras el baño o la ducha se seca rápidamente.
- No se pega a la ropa.
- Es altamente resistente



Bolsillo en bolsas traslúcidas

En la cubierta delantera de la bolsa traslúcida, referencias: 17943, 17944, 17940, 17941, 17942 se ha situado un bolsillo que permite esconder la válvula de vaciado, aportando al paciente una mayor discreción.

Tubo Corrugado

El set multicanal incorpora un **Tubo Corrugado** especialmente diseñado para optimizar el drenaje nocturno en personas urostomizadas, facilitando un mejor descanso. Presenta **diseño anti acodamiento** que evita el bloqueo del tubo y asegura el drenaje constante de la orina a la bolsa durante la noche. Su longitud de 120cm permite mayor libertad de movimientos durante la noche.

Características específicas por referencia:

A continuación, se presenta el cuadro de referencias. Alterna® Confort dispone de referencias recortables:

Adhesivo Swiss Roll Transparente Duración Extra Flexible	Producto	Tamaño	Aro	Código Nacional	Referencia	Estoma mm
	Transparente	Maxi	40 mm	400109	17945	10-35
			50 mm	400110	17946	10-45
			60 mm	400111	17947	10-55
	Traslúcida	Midi	40 mm	400107	17943	10-35
			50 mm	400108	17944	10-45
		Maxi	40 mm	400112	17940	10-35
			50 mm	400113	17941	10-45
			60 mm	400114	17942	10-55

La bolsa está abierta en su parte inferior, por lo que se podrá vaciar cada vez que se llene, siguiendo las indicaciones de los profesionales sanitarios que atiendan al paciente. Se aconseja al menos el empleo de una bolsa al día.

Resumen del material y su composición:

Adhesivo en espiral 	Distribuido en dos zonas: Parte interior del adhesivo (zona en espiral): En la parte central dos resinas están dispuestas a modo de espiral concéntrica con la siguiente composición: • Resina blanca: PIB (Poliisobutileno), SIS (Copolímero estireno-isopreno-estireno) e hidrocoloides. • Resina marrón: hidrocolóides, pectina e hidroxietilcelulosa Y un almidón natural (almidón de la patata). Ambas resinas contienen SIS (copolímero de estireno-isopreno-estireno) plastificado con aceite DOA y con una resina añadida para aumentar la adhesión. Parte exterior del adhesivo: El borde exterior del adhesivo está formado por un adhesivo transparente e incoloro. Se basa en una goma sintética (goma de butilo) y PIB (poliisobutileno) al que se ha añadido una resina para potenciar la adhesividad. Además, este adhesivo contiene hidroxietilcelulosa como absorbente de humedad y almidón de patata para la estabilización. Film de la parte superior (ubicada en la cara opuesta a la parte adhesiva que contacta con la piel) está compuesto de EVA (Etil-vinil-acetato).
Aro plástico en el disco	• Polietileno y EVA
Clíper	• Polietileno y EVA.
Cubierta Suave	• Cubierta suave de tela sin tejer de color blanco en su cara interna (referencias: 17945, 17946, 17947) y ambas caras (referencias 17943, 17944, 17940, 17941, 17942). • Composición: 98% Polipropileno y 2% Pigmentos de color
Cierre por tapón estriado	• Lámina plástica termosellada.
Válvula de vaciado	• Fabricada con SEBS (estireno-etileno-butileno-estireno) y polietileno con propiedades de sellado, PE-m.
Tecnología multi-canal	• Se forma por el sellado interno de las láminas de plástico
Válvula antireflujo	• Lámina plástica termosellada.
Film plástico	• Film plástico transparente de la bolsa, formado por cinco capas (EVA, EVA, PVdC, EVA y EVA)
Tubo corrugado	• Fabricado en polietileno

**Coloplast**Ostomy care
Urology & Continence care
Wound & Skin care**Medidas / Dimensiones:****Alterna®**
ConfortAdhesivo
Swiss Roll
Transparente
Duración Ex-
tra Flexible

Producto	Tamaño	Aro	Código Nacional	Referencia	Es-toma mm
Transpa- rente	Maxi	40 mm	400109	17945	10-35
		50 mm	400110	17946	10-45
		60 mm	400111	17947	10-55
Traslú- cida	Midi	40 mm	400107	17943	10-35
		50 mm	400108	17944	10-45
	Maxi	40 mm	400112	17940	10-35
		50 mm	400113	17941	10-45
		60 mm	400114	17942	10-55

Productos reembolsados por el Sistema Nacional de Salud

Envasado:

En cajas individuales con 30 bolsas + 7 discos Swiss Roll Transparentes Extra Flexibles, y 1 tubo corrugado con etiquetado en el que figura: la denominación del artículo, el número de lote y la referencia comercial.

**Conserva-
ción:** Tem-
peratura
ambiente de
10 a 25 gra-
dos



Garantía de Calidad:
3 años

Class I non-sterile
CE Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
Denmark



Instrucciones
de uso incluidos en cada
envase de venta.

*En caso de necesitarse formación adicional en el manejo del producto, Coloplast ofrece talleres de formación gratuitos a impartirse en los Hospitales sobre los productos de ostomía. Para más informa-
ción contacte con la delegada o delegado de Coloplast.*