

STEROTRAC

Equipo de tracción cutáneo adhesivo



DESCRIPCIÓN

1. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

La unidad de STEROTRAC está constituida por:

- ⌘ Tejido no elástico con adhesivo de caucho natural y óxido de zinc, dispuesto en forma de fina capa porosa uniformemente distribuido sobre la superficie.
- ⌘ Lámina de protección del adhesivo de papel siliconado.
- ⌘ Espuma blanca de poliuretano con placa central rígida de poliestireno.
- ⌘ Cuerda de tracción de material fuerte resistente a la abrasión.
- ⌘ Venda elástica de tracción larga con clip.

2. ENVASADO

2.1 Envase unitario

- ⌘ Presentación unitaria:
- ⌘ Bolsa plástica transparente con folleto.

2.2 Envase presentación o de venta

- ⌘ Caja de cartón corrugado.

3. DESCRIPCIÓN

STEROTRAC es un equipo adhesivo de tracción continua de la piel para miembros/extremidades inferiores.

4. PROPIEDADES

El adhesivo poroso proporciona una adhesividad máxima del tejido no elástico sobre la piel.

La venda que se suministra con el equipo ayuda a la adhesión del equipo de tracción mediante compresión sobre el miembro o extremidad.

El estribo o placa rígida está firmemente unido al equipo de tracción transmitiendo la tracción eficazmente.

La espuma protege las articulaciones de los lados de la pierna y el pie.

La cuerda de tracción se puede adaptar fácilmente a cualquier método standard de tracción.

Dimensiones	ADULTO (1360)	NIÑO (1362)
Venda de extensión (cm)	7,5 x 180	5 x 127
Placa (cm x cm x mm)	7,6 x 7,6 x 4,5	5 x 5 x 4,5
Cuerda de tracción (mm x cm)	3 x 226	3 x 155
Venda elástica (cm)	7,5	5
Espuma (cm)	1 x 9 x 45	1 x 6 x 30

5. INDICACIONES

Tracción musculoesquelética de miembros inferiores en tratamientos traumatológicos y ortopédicos.

STEROTRAC puede utilizarse para mejorar y mantener la alineación de los huesos en caso de fractura y dislocación.

6. CONTRAINDICACIONES

Contraindicado en pacientes que presenten alergia a los esparadrapos o al látex.

7. PRECAUCIONES

Rasurar la extremidad para que el equipo de tracción se adhiera firmemente a la piel seca y limpia.

Evitar los pliegues y las arrugas del equipo de tracción, pues podrían producir problemas de presión.

Examinar regularmente el estado de la pierna retirando la venda de compresión.

8. CADUCIDAD

5 años almacenado en lugar fresco (<25 °C), seco y protegido de la luz solar directa.

FABRICANTE

Clasificación (RD1591/2009): Clase I

Nº Organismo notificador CE: -

Fabricante: STEROPLAST Healthcare Ltd.