
Oper film surgical

Protector campo quirúrgico de poliuretano transparente autoadhesivo

FICHA TÉCNICA



VARIANTES DE PRESENTACIÓN

- 0031200: Oper film surgical 24cm x 16cm (38cm x 16cm)
- 0031210: Oper film surgical 24cm x 27cm (38cm x 27cm)
- 0031220: Oper film surgical 24cm x 40cm (38cm x 40cm)
- 0031230: Oper film surgical 34cm x 40cm (50cm x 40cm)
- 0031240: Oper film surgical 34cm x 60cm (50cm x 60cm)
- 0031245: Oper film surgical 53cm x 40cm (40cm x 68cm)
- 0031250: Oper film surgical 53cm x 80cm (68cm x 80cm)

FINALIDAD TERAPÉUTICA

Indicado para utilizar en cualquier tipo de cirugía para aportar al campo de incisión una mayor asepsia, evitando la migración de microorganismos de la piel hacia la zona quirúrgica, permaneciendo la misma en óptimas condiciones, incluso en intervenciones prolongadas.

DESCRIPCIÓN

Apósito quirúrgico de film de poliuretano transparente, con adhesivo acrílico hipoalergénico, elástico y adaptable, permeable al aire y al vapor de agua, impermeable al agua, barrera antibacteriana y atraumático.

MATERIALES

Soporte:

Film de poliuretano transparente

Oper film surgical

Protector campo quirúrgico de poliuretano transparente autoadhesivo

Adhesivo:

Adhesivo acrílico hipoalergénico.

Papel siliconado

Protege la zona adhesiva. Permite un rápido y fácil manejo.

“Producto exento de látex, DEHP y PVC”

“Producto Radiotransparente”

PROPIEDADES

Un film extensible y de gran permeabilidad

Gracias a un proceso de producción avanzado, el adhesivo del **Oper film surgical** está aplicado sobre el soporte de poliuretano transparente, respetando su permeabilidad. La permeabilidad del apósito evita la maceración de la piel.

Un alto poder de adherencia sin disolventes químicos

El alto poder adhesivo y la gran elasticidad de **Oper film surgical**, permiten una perfecta fijación en las zonas corporales más difíciles.

Lámina protectora diseñada para una colocación estéril

La lámina protectora permite una aplicación rápida sin que entre en contacto con la zona del apósito que cubrirá el campo quirúrgico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Soporte (Film PU transparente)

PROPIEDADES	UNIDAD	VALOR	NORMA
Fuerza rotura CD/MD	MPa	≥ 45	UNE-EN ISO 527-3
Elongación CD/MD	%	≥ 450	
Espesor	micras	25 ± 3	DIN 53370

Soporte adhesivado (Film PU transparente adhesivado)

PROPIEDADES	UNIDAD	VALOR	NORMA
Gramaje del adhesivo	g/m ²	40 ± 7	FINAT FTM 12
Adhesividad	g/25 mm	650-1200	UNE-EN ISO 1939
Permeabilidad (MVTR)	g·m ⁻² ·24h ⁻¹ a 37°C	720 ± 10%	UNE-EN ISO 13726-2

Oper film surgical

Protector campo quirúrgico de poliuretano transparente autoadhesivo

DIMENSIONES Y ENVASADO

REFERENCIA	DIMENSIÓN ZONA ADHESIVADA	DIMENSIÓN TOTAL	UD./ ESTUCHE	ESTUCHE/ CAJA	UD. CAJA (UD. VENTA)
0031200	24x16 cm	38x16 cm	20	12	240
0031210	24x27 cm	38x27 cm	20	8	160
0031220	24x40 cm	38x40 cm	20	6	120
0031230	34x40 cm	50x40 cm	15	5	75
0031240	34x60 cm	50x60 cm	10	8	80
0031245	53x40cm	68x40 cm	10	4	40
0031250	53x80 cm	68x80 cm	10	4	40

El producto se presenta en unidades protegidas en el interior de un envase primario, constituido de papel grado médico y film, que permite la esterilización y proporciona una barrera microbiana, manteniendo estéril el producto durante su ciclo de vida.

Los envases primarios se envasan en el interior de un estuche adaptado a su forma y agrupación que, a su vez, se agrupan en cajas de cartón para transporte:

- Razón social del fabricante
- Código y descripción del producto
- Lote
- Unidades
- Fecha de fabricación
- Fecha de caducidad
- Método de esterilización
- Marca CE con nº de organismo notificado
- Código GS1 128
- Símbolos armonizados

INSTRUCCIONES DE USO

1. Desinfectar el sitio quirúrgico según protocolo de la institución y/o servicio.
2. Asegúrese de que la piel del paciente esté seca y sin restos de jabón.
3. Extraiga la unidad de **Oper film surgical** del sobre individual.
4. Sujetar el rollo de **Oper film surgical** por los extremos y posicionarlo en la zona que se quiera proteger.
5. Retirar los primeros centímetros del papel protector siliconado (para dejar libre parte del poliuretano adhesivado) y seguidamente colocarlo en el área seleccionada.
6. Hacer una ligera presión sobre el poliuretano, para asegurar la adhesión del producto con la piel del paciente.
7. A partir de este momento, se puede empezar a desplegar el rollo de **Oper film surgical**, tirando del papel protector siliconado. Es importante tener contacto visual con la zona de aplicación para asegurar la buena colocación del film.

Oper film surgical

Protector campo quirúrgico de poliuretano transparente autoadhesivo

8. Cuando aparezca el texto "**STOP**", dejar de desplegar el rollo de **Oper film surgical**. Estirar el film de poliuretano sin crear tensión para que éste se fije en la piel sin tensión y evitando la formación de bolsas de aire que impidan una adhesión homogénea.
9. Usando una talla estéril, presionar suavemente el film de poliuretano sobre la piel del paciente, para asegurar un buen contacto del adhesivo y conseguir la máxima capacidad de fijación.
10. Para retirar el **Oper film surgical**, sujetar la piel de alrededor del campo quirúrgico mientras es retirado, para evitar traumatismos. A continuación, doblar uno de los bordes del **Oper film surgical** sobre sí mismo y desprenderlo lentamente hacia atrás en 180° o plegándolo sobre sí mismo mientras se va retirando el film de poliuretano.

CONSERVACIÓN

Conservar el producto en condiciones habituales de material sanitario: en lugar fresco y seco y al abrigo de la luz.

La utilización de papel de grado médico y film en el envase primario garantiza su esterilidad durante el periodo de caducidad indicado, en condiciones normales de transporte y almacenamiento.

CADUCIDAD

5 años a partir de la fecha de su fabricación.

OBSERVACIONES

El producto debe usarse solamente por personal especializado.

Comprobar la integridad del envase previamente a su uso. No utilizar si está abierto o dañado.