

## Salvafix® Standard – Cinturón con Banda Perineal

### Descripción del producto

Cinturón Standard de sujeción abdominal, para prevenir las auto-lesiones de los pacientes y las caídas de la cama o camilla, con sistema de cierre con apertura magnética.

Se compone básicamente de dos piezas. Un cinturón abdominal con ajuste regulable mediante ollados y una base para la fijación del conjunto a la cama. Ambas piezas están unidas mediante costuras reforzadas sin articulación. Incorpora dos bandas laterales cosidas que aumentan la seguridad, y una banda perineal fija al cinturón para evitar que el paciente pueda liberarse deslizándose hacia abajo.



Código	Talla	Contorno Mín. / Máx.	Ancho
SVF3031P	S	46 / 76 cm	16 cm
SVF3030P	M	68 / 108 cm	18 cm
SVF3032P	L	95 / 135 cm	18 cm

**Nombre comercial:** Salvafix STANDARD Cinturón con banda perineal

**Fabricante:** MEDI CARE SYSTEM, S.L.U.

### Materiales

Fabricado en cintas de poliéster 100%, con refuerzo interior en zonas de mayor solicitud de esfuerzos. Ollados de acero inoxidable, colocados sobre taladrado por ultrasonidos. Ribete suave de poliéster 100% de color azul.

El sistema de cierre consta de un pivote metálico de base plana de acero inoxidable y un botón cilíndrico amarillo de Policarbonato / ABS con mecanismo mecánico. Llave magnética con centrador para abrir el sistema de cierre que consta de un imán de neodimio cilíndrico insertado en una pieza azul de poliamida-6.

**Composición:** 100% Poliéster

**Color:** Crudo con ribete azul. Existe un código de colores en la etiqueta del producto para identificación de modelos y tallas: amarillo / talla S, azul / talla M, verde / talla L

### Características

**Lavado:** Lavado a máquina a temperatura máxima de 90°C  
No usar lejía  
Secar a máquina a temperatura moderada  
No planchar



**IMPORTANTE:** Los botones de cierre nunca deben ser humedecidos ni sumergidos en líquidos. Utilizar siempre el cinturón junto a las barandillas laterales de la cama subidas.

**Presentación:** Bolsa de plástico conteniendo:

- 1 cinturón con 2 bandas laterales y perineal cosidos
- 3 sistemas de cierre (tallas L 4 sistemas de cierre)
- 1 llave magnética
- Instrucciones de colocación e información de seguridad

Cajas de cartón reciclado con 3 unidades.

