

Drainjet® Fisiológico para irrigación



Solución para uso interno y externo envasada en frascos Drainjet (frascos tipo fuelle) con tapón protector.

¿Qué es Drainjet® Fisiológico para irrigación y para qué se utiliza?

Es una solución salina isotónica (fisiológica) para aplicación interna y externa.

Drainjet® Fisiológico para irrigación se utiliza para:

- para irrigación posoperatoria de la vejiga en intervenciones quirúrgicas urológicas
- para irrigación del tracto gastrointestinal
- para irrigación de fístulas y drenajes
- para la limpieza de heridas y lesiones por contacto directo o mediante apósitos para heridas impregnados como gasas y vendajes.

No use Drainjet® Fisiológico para irrigación

Si es hipersensible (alérgico) al cloruro de sodio o a cualquiera de los demás componentes de Drainjet® Fisiológico para irrigación.

Precauciones especiales para el uso de Drainjet® Fisiológico para irrigación

Se recomienda precaución al aplicar cantidades grandes de esta solución (varias aplicaciones diarias) si su sangre contiene demasiado sodio o cloruro (hipernatremia o hipercloremia) o se está hiperhidratado.

Uso de Drainjet® Fisiológico para irrigación con otros medicamentos

No hay interacciones conocidas con otros medicamentos.

Posología

La dosis se determina en función de los requerimientos durante el procedimiento, según la prescripción facultativa.

Forma de administración

Para uso interno y externo tal y como indique su médico. No apta para la perfusión o inyección.

Manipulación del frasco *Drainjet® Fisiológico para irrigación* Antes de abrir utilizar la solución se recomienda realizar una inspección visual signo de daño en el cierre, sellado o bordes del envase ya que pueden comprometer la esterilidad de la solución. El cierre interior (pestaña interna) puede ser inspeccionado fácilmente a través del tapón protector translúcido.

Solo debe utilizarse si la solución es transparente, incolora, libre de partículas y el envase está intacto. En caso de duda, la solución no debe utilizarse.

Después de la apertura la solución debe utilizarse inmediatamente.

1. Para abrir el frasco, girar el tapón protector 360°. Este giro rotacional propicia la apertura (pestaña interna) en contacto con la solución sin necesidad de manipular la pestaña interna.





Nota: el cierre interior consiste en una pestaña. El movimiento de rotación del tapón protector ejerce a su vez un movimiento de rotación sobre la pestaña interna permitiendo la apertura del frasco. La pestaña interna queda luego retenida en el interior del tapón protector.

2. Retirar el tapón protector tal y como indica el dibujo. **Atención!** Realizar esta operación con la precaución de frasco *Drainjet®* ya que de ser así no esterilidad.



Para el uso con catéter

3. Conectar la punta del frasco con el irrigar directamente (según el uso
4. Vaciar el contenido del frasco en el el frasco. En el caso de ligeros catéter se recomienda recuperar la mediante movimientos de bombeo frasco.
5. Quitar el frasco del catéter y conectar el catéter con la bolsa de recogida de orina.
6. Desechar cualquier frasco *Drainjet®* contaminado y usado.
7. La irrigación del catéter se puede repetir sin limitaciones con frascos *Drainjet®* nuevos (1-6).

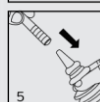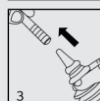

catéter del paciente o indicado).

catéter comprimiendo sedimentos en el viabilidad del catéter mecánicos con el

Posibles efectos adversos No se conoce ninguno hasta el momento.

Consulte a su médico o farmacéutico si experimenta cualquier tipo de efecto adverso.

CONSERVACIÓN de *Drainjet® Fisiológico para irrigación*

Mantener *Drainjet® Fisiológico para irrigación* fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice el producto después de la fecha de caducidad que se indica en el envase.

Condiciones de conservación

- No se requiere condiciones especiales de conservación para *Drainjet® Fisiológico para irrigación*.
- En algunas situaciones los envases de plástico pueden sufrir daños durante el transporte del fabricante hasta el usuario. Estas situaciones pueden propiciar la contaminación de la solución con microorganismos o hongos.
- Por lo tanto siempre es recomendable realizar una inspección visual cuidadosa antes de utilizar la solución. Se debe prestar particular atención incluso al menor signo de daño en el cierre, sellado o bordes del envase por posible contaminación.
- En caso de duda, la solución no debe utilizarse.

Periodo de validez después de la primera apertura del envase Este producto sanitario es sólo para un único uso. Tras la apertura del envase, la solución deja de ser estéril. No puede reutilizarse. En caso de reutilización existe riesgo de contaminación microbiana que podría afectar al paciente produciendo una infección.

Otra información

Composición de *Drainjet® Fisiológico para irrigación*

1 litro de solución contiene: Cloruro de sodio

9,0 g

Agua para preparaciones inyectables c.s.

Osmolaridad teórica 308 mOsm/l

pH 5.0-7.0

Acidez <1 mmol

titulable NaOH/l

Contenido Na+ 154

iónico mmol/l

Cl- 154

mmol/l

Aspecto de *Drainjet® Fisiológico para irrigación* y contenido del envase.


Drainjet® Fisiológico para irrigación es una solución transparente e incolora.

Drainjet® Fisiológico para irrigación está disponible en los siguientes formatos:

Envase de 10 frascos de 60 ml

Envase de 10 frascos de 120 ml

Explicación de los símbolos utilizados en el etiquetado:

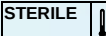 0123	Marca CE de conformidad con la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/EEC (enmienda) con la intervención del Organismo Notificado 0123
	Símbolo para "ESTERILIZADO UTILIZANDO VAPOR DE AGUA O CALOR SECO".
	Símbolo para "NO REUTILIZAR"
	Símbolo para "FABRICANTE". Este símbolo debe ir acompañado del nombre y dirección del fabricante (la persona que pone el producto en el Mercado).
	Símbolo para "CONSÚLTENSE LAS INSTRUCCIONES DE USO"
	Símbolo para "CÓDIGO LOTE". Este símbolo debe ir acompañado del código del lote del fabricante. El código del lote debe aparecer adyacente al símbolo.
	Símbolo para "FECHA DE CADUCIDAD". Este símbolo debe ir acompañado por una fecha (año y mes) para indicar que el producto no se debería utilizar después del final de la fecha indicada (YYYY-MM)
	Símbolo para "NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTÁ DAÑADO".

Fabricante:



Fresenius Kabi AG
61346 Bad Homburg Alemania

Fecha de revisión del texto: Octubre 2021

