

MASCARILLA FFP2 AJUSTE AURICULAR “UNIDIX”

Mascarilla de protección respiratoria para proteger al usuario frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles mediante la autofiltración de partículas o aerosoles.

Equipo de Protección Individual. Resistente al agua.

En cumplimiento con la normativa UE 2016/425 de Equipos de Protección Individual y EN149:2001+A1:2009 con nivel FFP2 de protección.

Eficacia de Filtración $\geq 92\%$. No reutilizable “NR”.

Un solo uso, desechable. 100% exento de látex.



Propiedades Mascarilla

Fabricada en 4 capas

- Capas externas de PP.
- Filtro interno.
- Dimensiones: 15,5x20cm
- Blanca.
- Diseño de plegado verticalmente.
- Ajuste auricular con dos bandas laterales.

Propiedades Clip nasal

Fabricado en barra de hierro galvanizado recubierto por plástico.

- Modelable.
- Apariencia: Plateado.
- Situado en zona interior.

MODO DE EMPLEO DE LA MASCARILLA DE PROTECCIÓN FFP2

- › Colocar la mascarilla en la mano.
- › Colocar la mascarilla sobre la nariz y la boca con el clip metálico de ajuste hacia arriba.
- › Colocar las gomas alrededor de las orejas.
- › Dar forma al clip de la nariz para lograr el ajuste deseado y colocar la máscara para lograr un ajuste completo a la cara.
- › Comprobar que el ajuste facial de la mascarilla es el correcto antes de entrar en el área contaminada. Cubrir la totalidad de la mascarilla con ambas las manos y exhalar con fuerza. Si detecta fugas de aire por los bordes, reajustar el respirador.

IMPORTANTE

- › Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el respirador proporciona el nivel de protección necesario para el tipo y la concentración de los contaminantes en el área en la que el respirador esté siendo utilizado.
- › No usar en ambientes con concentraciones de contaminantes desconocidas ni atmósferas que contengan menos del 17% de oxígeno.
- › “NR” Un solo uso (máximo 8 horas). Desechar y reemplazar la mascarilla por una nueva si existen molestias o dificultad para respirar.
- › Usar la mascarilla de acuerdo a las regulaciones de salud y seguridad aplicables y mantener la mascarilla durante la exposición a los contaminantes.
- › Colocarse la mascarilla y comprobar la estanqueidad antes de entrar en la zona contaminada. Es posible que el vello facial afecte negativamente en este punto.
- › Abandonar el área contaminada si se producen mareo, irritación u otro tipo de malestar.

BENEFICIOS

- › Uso permitido en diversas situaciones incluso en ambientes húmedos ya que es repelente al agua.
- › El clip nasal permite adaptarse totalmente a la forma facial del usuario que permite mayor comodidad y un ajuste más preciso.
- › Zona nasal interna proporciona mayor estanqueidad secundaria a dicho ajuste.
- › Doble banda elástica de sujeción auricular que permite asegurar la posición durante el uso y el libre movimiento del usuario sin que se desplace.
- › Normativa y nivel de protección marcado en mascarilla ayuda a identificar rápidamente la protección seleccionada.
- › Material hipoalergénico, sin fibra de vidrio, libre de ftalatos y 100% exento de látex.

REFERENCIA, UNIDADES Y CÓDIGO DE BARRAS

Caja con 20 unidades protegidas de una bolsa.

| REFERENCIA | UNIDADES | EAN13 |
|------------|----------|---------------|
| WLM2013 | 20 | 8432229557119 |
| | 200 | 8432229657116 |



Fabricadas para GRUPO UNIDIX en conformidad con las directrices y estándares del Reglamento (EU) 2016/425 para Equipos de Protección Individual. Clasificación NR FFP2.
EN149:2001+A1:2009.
ISO 9001: 2015 e ISO 13485:2016 de calidad.

Condiciones de almacenaje:

Almacenar en su caja original en un entorno limpio, seco y fresco protegidos de exposición a polvo, químicos o luz solar directa. Limitación de temperatura entre -25 y +25°C °C y h.r. de <80%.