

TFDN

JABÓN DESCONTAMINANTE DE RADIACIÓN POR INMERSIÓN



Información de producto:

- > Detergente desengrasante con formación de espuma, indicado para Servicios de Medicina Nuclear.
- > Descontaminación de radioactividad por arrastre de radioisótopos debido a una combinación de secuestrantes.
- > Eliminación de todos los tipos de residuos orgánicos e inorgánicos.
- > De fácil aclarado.
- > Compatible con una amplia variedad de materiales gracias a su pH neutro.

Método de empleo:

Preparación de solución al 10%:

- > Utilizar Equipo de Protección Individual (EPI).
- > Preparar una solución de TFD Neutre al 10% en agua fría.

Utilización

Para instrumental sumergible

- 1> Sumergir el instrumental a descontaminar durante 15 minutos.
 - 2> Aclarar abundantemente con agua.
 - 3> Secar.
 - 4> Verificar el nivel de contaminación residual.
- Repetir el procedimiento en caso de ser necesario.

Para superficies

- 1> Limpiar las superficies contaminadas con un paño seco de un sólo uso embebido en una solución de TFD Neutre al 10%.
 - 2> Aclarar con agua, si es necesario.
 - 3> Dejar secar.
 - 4> Verificar el nivel de contaminación residual.
- Repetir el procedimiento en caso de ser necesario.

TFDN - JABÓN DESCONTAMINANTE

Precauciones de uso:

PRECAUCIÓN: consultar ficha de seguridad (FS 010102)
ATENCIÓN: Provoca irritación ocular grave. SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si usa lentes de contacto, retírelas, si es posible. Continuar el aclarado. Este producto esta destinado exclusivamente a profesionales. El embalaje debe ser eliminado como residuo peligroso, bajo la entera responsabilidad del tenedor de residuos. No eliminar los residuos en alcantarillas o cursos de agua. Almacenar en un lugar protegido del hielo.

El envase contiene numero de lote, fecha de fabricación y de caducidad.

Características	Composición
Aspecto: Líquido Color: Incoloro	Agentes tensioactivos no iónicos y aniónicos
pH al 10%: 6,5 VPH puro: 6,5	Agentes secuestrantes
Densidad: 1,033 Validez: 2 años	
Tiempo de conservación una vez abierto: 6 meses.	



PRESENTACIÓN
Garrafa de 5 litros.

Ref. TFDN
Ref. fabricante: TFD Neutre

Rev. FT 255.C
F4v2_10.2016
Producto peligroso, respete las precauciones de utilización. Antes de usar, lea la etiqueta y la información correspondiente al producto.