



MEPORE - APÓSITO ADHESIVO ABSORBENTE

Mepore es un adhesivo permeable al aire y adhesivo ideal para heridas con un nivel de exudado entre bajo y alto. Su adhesivo de poliacrilato es soluble al agua y sin embargo asegura una firme sujeción, sin ser agresivo para la piel.

BENEFICIOS DE MEPORE®

- Adhesivo soluble en agua no agresivo con la piel.
- La capa de contacto con la herida tiene baja adherencia minimizando el riesgo de adherencia a la herida.
- Parte posterior repelente a líquidos.
- El papel protector, fácil de retirar, permite una adecuada y aséptica aplicación.
- Permeable al aire, previene la maceración y da mayor comodidad.
- Esquinas redondeadas para una segura fijación (todos los tamaños hasta 9x15 cm.).

CÓMO FUNCIONA MEPORE

La estructura porosa del tejido Nonwoven asegura la permeabilidad al aire y al vapor de agua. El tejido es extensible, se adapta perfectamente al contorno del cuerpo y permite libertad de movimientos. El tejido es no absorbente, por lo que constituye una barrera para la sangre y los fluidos. El adhesivo de poliacrilato ha sido diseñado para adherirse suavemente a la piel al mismo tiempo que proporciona una fijación óptima. El cuerpo de absorción absorbe moderadas cantidades de exudado y presenta un riesgo mínimo de adhesión a la herida gracias a su superficie de baja adherencia.

El papel protector permite una aplicación estéril al mismo tiempo que simplifica la aplicación del apósito.



ABRIR EL ENVASE Y RETIRAR EL APÓSITO



SUJETAR AMBAS SOLAPAS, COLOCAR UNA PARTE DE LA SUPERFICIE ADHESIVA PARA UNA FIJACIÓN INICIAL



COLOCAR EL APÓSITO EN LA PIEL SIN ESTIRAR Y RETIRAR SUAVEMENTE EL RESTO DEL PAPEL PROTECTOR. APRETAR SUAVEMENTE LOS BORDES ADHESIVOS PARA OBTENER UNA ADHESIÓN APROPIADA. NO ESTIRAR



INDICACIONES

Mepore puede usarse en una amplia variedad de heridas, aquellas que tienen entre un nivel de exudado bajo a moderado. Esto incluye heridas quirúrgicas, quemaduras menores, cortes y abrasiones.

Apósito autoadhesivo **estéril**

Descripción

Apósito adhesivo en los 4 lados, estéril, con alta tolerancia cutánea.

Composición

- **Parte absorbente:** - Superficie hipoadherente en contacto con la herida compuesta de un film de poliolefina.
- Cuerpo absorbente 100% de viscosa.
- **Base adhesiva:** - Poliacrilato con una alta tolerancia cutánea, no irritante, no sensibilizante aplicado como emulsión acuosa.
- Tejido sin tejer 100% poliéster extensible, hidrófobo, permeable al aire.
- Adhesivo de poliacrilato con alta tolerancia cutánea, no irritante, no sensibilizante (aplicado en forma de emulsión acuosa)
- **Papel protector:** - Papel protector de polietileno y silicona que garantiza una aplicación estéril.

Observación: Mepore no contiene látex.

Características técnicas

Apósito:

- Hipoadherente.
- Tolerancia cutánea: elevada - Huntingdon Research Center GB
- Blanqueadores: ninguno
- Elástico

Test de irritación cutánea primaria (FHSA), NAMSA® :

- Índice de irritación del adhesivo: 0,00
- Índice de irritación de la compresa absorbente: 0,00
- Ausencia de irritación.

Capacidad de absorción:

- Método EDANA ref 10.1.72
ref. 670800 : 7g/g
ref. 670900: 10g/g
ref. 671000: 10g/g
ref. 671100: 10g/g
ref. 671200: 10g/g
ref. 671300: 10g/g
ref. 671400: 10g/g

Adhesivo:

- Adhesividad: >2N/cm - Farmacopea
- Adhesión instantánea: 0,673N/mm
- Adhesión retardada: 1,47N/mm
- Permeabilidad al aire: 19 l/min.
- Transmisión del vapor de agua: >6800 g/m²/24h (ASTM D 6701-01)
- Resistencia mínima a la ruptura: longitud: 30N/cm - Farmacopea

Dimensión de la superficie absorbente:

Referencias	Tamaño total apósito (cm)	Tamaño compresa central (cm)
670800	6 x 7	3 x 4
670900	9 x 10	4,5 x 6
671000	9 x 15	4,5 x 10
671100	9 x 20	4,5 x 15
671200	9 x 25	4,5 x 20
671300	9 x 30	4,5 x 25
671400	9 x 35	4,5 x 25

Indicaciones

- ▷ Heridas quirúrgicas secas o ligeramente exudativas.

Presentaciones y embalajes:

Presentación en embalaje unitario estéril.

Presentaciones disponibles:

Referencias	Tamaño (cm)	Envase (unids.)	TRP (unids)
670800	6 x 7	60	480
670900	9 x 10	50	400
671000	9 x 15	50	400
671100	9 x 20	30	180
671200	9 x 25	30	210
671300	9 x 30	30	270
671400	9 x 35	30	180

Presentaciones financiadas por la Seguridad Social :

Código Nacional	Ref. Mölnlycke	Tamaño (cm)	Envase (unids.)	TRP (unids)
489310	670840	6 x 7	10	140
489328	670940	9 x 10	10	200
489336	671040	9 x 15	10	140
489344	671140	9 x 20	10	140

Marcado CE: Clase I

Otra información:

1. Embalaje: Triple protección

- Caja de transporte de cartón resistente.
- Caja interior que contiene los apósitos envasados individualmente.
- Bolsa de papel que contiene una unidad, para ser abierta en el momento de uso.

2. Envase que permite una manipulación aséptica durante la utilización.

3. Fecha de caducidad expuesta en el envase: 5 años después de la esterilización.

4. Mepore debe aplicarse sobre la herida sin intercalar compresas.

5. No desengrasar la piel con éter antes de la aplicación.

6. No contienen látex ni el producto, ni su embalaje.