

DAUERBINDE F

Venda elástica de tracción larga



DESCRIPCIÓN

1. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

La unidad de DAUERBINDE F está constituida por:

- Tejido elástico de 63% algodón, 28% poliamida y 9% elastano.
- Clip de aluminio con barniz de poliéster y cinta elástica con interior de lycra recubierta de poliéster.

El final de las vendas está fijado con una etiqueta de transferencia térmica (silicona, barniz de poliuretano, barniz UV, pigmentos de color y capa adhesiva de copoliamidas y aglutinante).

2. ENVASADO

2.1 Envase unitario

- Estuche de celulosa con instrucciones de uso.

2.2 Envase presentación o de venta

- Estuche de celulosa con instrucciones de uso.

3. DESCRIPCIÓN

Venda de elasticidad permanente de color carne, densamente tejida en líneas, bordes cosidos, extremos tratados para evitar que se deshilache y enrollada sobre sí misma.

4. PROPIEDADES

Dauerbinde F presenta una extensibilidad aproximada de 160 %, de tracción larga/compresión fuerte con una estructura textil característica. Gracias a su calidad de tracción larga permite variar y controlar el nivel de compresión requerido para cada paciente. La venda se adapta bien al cuerpo, es suave y agradable a la piel, no es muy voluminosa, permeable al aire y es resistente y fácil de lavar.

Dauerbinde F puede esterilizarse mediante vapor u óxido de etileno de acuerdo con las normas DIN EN ISO 17665-1 y DIN EN ISO 11135-1,

respectivamente. Después de la esterilización mediante vapor es posible que los parámetros “longitud en tensión” y “extensibilidad” cambien. La venda puede lavarse con un detergente suave hasta 10 veces a 95°C y debe dejarse secar en posición horizontal. Como consecuencia del lavado la extensibilidad puede aumentar.

5. INDICACIONES

Dauerbinde F está indicada para la inmovilización de extremidades, fijación de apósitos y terapia de compresión (linfología y flebología). Para vendajes de apoyo y descarga en lesiones de ligamentos y articulaciones.

6. CONTRAINDICACIONES

Enfermedades vasculares periféricas avanzadas.
Insuficiencia cardíaca descompensada.
Flebitis séptica.
Flegmasia cerulea dolens.
Trastornos de sensibilidad de la piel.
Intolerancia al material de la venda.

7. PRECAUCIONES

No cortar la venda.
Aplicar sobre piel sana y sin cicatrices.
Debido a la fuerte compresión que ejerce la venda cuando el paciente está en reposo, es necesario retirar el vendaje por la noche o cuando el paciente descanse.
En caso de sentir fuertes dolores mientras lleva puesta la venda, el paciente debe avisar a su médico. Un vendaje inadecuado puede causar necrosis cutáneas y daños nerviosos debido a una presión excesiva.
El látex no es un ingrediente añadido intencionadamente en el proceso de fabricación. Sin embargo, hasta donde sabemos, no podemos excluir completamente contaminaciones potenciales con trazas de látex de la producción o del ambiente.

8. CADUCIDAD

5 años almacenado apropiadamente.

FABRICANTE

Clasificación (RD1591/2009): Clase I
Nº Organismo notificador CE: -
Fabricante: Lohmann & Rauscher
International GmbH & Co. KG