

GORRO QUIRÚRGICO UNIDIX

Gorro quirúrgico con cintas de sujeción, de tejido no tejido de polipropileno (PP). 100% exento de látex. Hipoalergénico.

Su función es contribuir a la asepsia y reducir los riesgos de contaminación entre el personal y el paciente, así como la caída del cabello sobre el campo quirúrgico para evitar posibles transmisiones no deseadas.

Propiedades

- Elongación en sentido vertical: 104.2%
- Elongación en sentido del tejido: 105.1%
- Fuerza de rasgado vertical: 19.1N
- Fuerza de rasgado en sentido del tejido: 15.2N



Cinta de agarre

- Hilo de poliéster.
- Garantiza una correcta sujeción del gorro.
- Mayor seguridad de agarre

Tejido sin tejer de PP

- Gramaje: 16gr/m².
- Longitud total: 63 cm
- Ancho total: 13 cm
- Color: azul

MODO DE EMPLEO DEL GORRO QUIRÚRGICO UNIDIX



- > Extraer la unidad de la bolsa.
- > Recoger y atar el cabello colocándolo en su totalidad dentro del gorro, incluyendo el flequillo y las orejas.
- > Ajustar el gorro a medida con las cintas de sujeción.
- > Descartar el gorro una vez finalizado el procedimiento.

BENEFICIOS

- > Evita la posibilidad de contacto entre el equipo médico y el paciente y las zonas expuestas de éste.
- > Sirve de barrera contra la caída del cabello y por consiguiente protege de los microorganismos que florecen en él.
- > Protege de la sudoración que se produce en la frente al tener una correcta transpiración.
- > No deja marcas en la piel.

EMPAQUETADO, REFERENCIA Y CÓDIGO DE BARRAS

Referencia	UDS	EAN13
09010	100	8432229200145
	1000	8432229300142

Fabricadas para GRUPO UNIDIX en conformidad con el Reglamento (EU) 2017/745. Producto Clase I.

Estándares aplicados: Evaluación biológica acorde EN ISO 10993-1, 5 y 10. Aseguramiento de la calidad ISO 13485:2016 y gestión de riesgos EN ISO 14971:2019. Información del fabricante y simbología en etiquetado acorde EN 1041:2008+A1:2013 y EN ISO 15223-1:2016.