

FICHA TÉCNICA

NDP Med RTU	Marcado CE ON 0476 MED 31348	Versión 14 Fecha de última revisión: 04.03.20 HOJA 1 de 3
--------------------	---	--

Vesismín S.L.

C/ Lluçà, 28 5º
08028 Barcelona (Spain)
Telf: +34 934.095.301
Fax: +34 933.396.628

Descripción

- NDP Med RTU es un producto elaborado a partir de la N-Duopropenida.
- La NDP® es un compuesto microbicida que provoca la inactivación de enzimas y coenzimas vitales para la vida de los microorganismos patógenos.
- El principio activo es una mezcla de yodóforos de amonio cuaternario combinado con aminas terciarias y fenoxietanol, con tensioactivos catiónicos y no iónicos con propiedades sinérgicas netamente diferenciadas de los compuestos de amonio cuaternarios tradicionales.
- Producto sanitario de clase IIb

Aplicaciones

Endoscopios, material médico-quirúrgico, odontológico, equipos de cirugía, anestesiología, urología, terapia respiratoria, cubetas, etc.

Composición

Ingredientes	Concentración
N-Duopropenida	0.46%
Alquilamina	0.2%
Fenoxietanol	0.1 %
Alcoholes grasos, excipientes y agua csp	100%

Propiedades físico-químicas

Estado a T^{ra} ambiente	Líquido amarillo claro transparente
pH (100% agua)	6.5 – 8.5 (20°C)
Solubilidad en agua	Soluble al 100%

FICHA TÉCNICA

NDP Med RTU	Marcado CE ON 0476 MED 31348	Versión 14 Fecha de última revisión: 04.03.20 HOJA 2 de 3
--------------------	---	--

Densidad	0.900 – 1.100 g/cc (20°C)
Punto de ebullición	Aproximadamente 98°C
Inflamabilidad	No inflamable.
Tensión superficial	23 din/cm (dilución 1/1000 de IAT): fácil humectación de materiales y adherencia a superficies
Solubilidad	Soluble en disolventes polares, insoluble en apolares
Interacción con materiales	Las soluciones no son corrosivas y no alteran los materiales ensayados: acero AISI 316, aluminio, polipropileno, poliestireno y silicona.
Estabilidad	- El producto es estable durante periodos prolongados sin perder actividad. - La luz solar no afecta la actividad de las soluciones.

Actividad antimicrobiana

	Tiempo (min)	Reducción
BACTERIAS		
EN 14561 (<i>Staphylococcus aureus</i>)	30 seg.	>5log ₁₀
UNE EN 1276 (<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Escherichia coli</i>)	5 min	>5log ₁₀
UNE EN 1276 multiresistente (<i>Acinetobacter baumannii</i> poliR, <i>Staphylococcus aureus</i> SAMR, <i>E. faecium</i> poliR, <i>E. coli</i> productor BLEE)	1 min	>5log ₁₀
EN 14561 (<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>)	15 min	>5log ₁₀
EN 13727 (<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>)	2 min	>5log ₁₀
MICOBACTERIAS		
EN 14348 (<i>Mycobacterium avium</i> , <i>Mycobacterium terrae</i>)	15 min	>6log ₁₀
EN 14563 (<i>Mycobacterium avium</i> , <i>Mycobacterium terrae</i>)	25 min	>4log ₁₀
HONGOS		
EN 14562 (<i>Candida albicans</i>)	30 seg.	>4log ₁₀
UNE EN 1650 (<i>Aspergillus niger</i> , <i>Candida albicans</i>)	15 min	>4log ₁₀
EN 13727 (<i>Candida albicans</i>)	2 min	>4log ₁₀
VIRUS		
VIH, VHB	5 min	>5log ₁₀
EN 14476: Rotavirus, Polyomavirus, VHC Coronavirus-SARS, Vaccinia, Papovavirus	15 min	>5log ₁₀

FICHA TÉCNICA

NDP Med RTU	Marcado CE ON 0476 MED 31348	Versión 14 Fecha de última revisión: 04.03.20 HOJA 3 de 3
--------------------	---	--

Modo de empleo

El producto se presenta listo para usar, no requiere dilución previa.

→ Desinfección

- Limpiar correctamente el material, eliminando la materia orgánica por arrastre físico. Se recomienda el uso de un detergente enzimático o solución jabonosa cepillando tanto las superficies externas como internas.
El objetivo es eliminar los restos de materia orgánica para facilitar la acción del desinfectante.
Vesismín recomienda el uso de Enzym Med dada su alta calidad y compatibilidad con NDP Med RTU.
- Sumergir el material una vez limpio en la solución de producto. La inmersión debe realizarse de modo que todas las superficies estén en contacto con la solución desinfectante. Dejar actuar durante el tiempo recomendado en total inmersión (**25 min** para eficacia micobactericida, ver apartado Actividad antimicrobiana).
No utilizar la solución desinfectante más de 20 usos o inmersiones.
- Aclarado. Se aconseja un aclarado a presión para materiales con canales internos.
Se aconseja el uso de agua sanitaria para evitar la recontaminación posterior del instrumental.
- Secado aséptico con aire a presión de modo que llegue a los canales internos del material.

Precauciones

- Leer atentamente la etiqueta antes de utilizar el producto. Una utilización inadecuada del producto puede provocar una deficiente desinfección del endoscopio.
- El producto debe cerrarse una vez abierto la primera vez para evitar posibles contaminaciones. Una vez abierto, utilizar en 6 semanas.
- No utilizar conjuntamente con productos que contengan o liberen cloro (hipocloritos), ni con detergentes en base a tensoactivos aniónicos, ni con productos mercuriales.

Presentaciones

Botellas de 1L: Referencia MR1000IFE

Garrafas de 5L: Referencia MR5000IFE