

Venda cohesiva CPK SPORT



DESCRIPCIÓN

Tejido elástico longitudinalmente compuesto de fibras sintéticas de poliéster/nylon de alta resistencia, recubierto por ambas cara de masa cohesiva libre de látex.

Sólo de adhiere sobre sí misma y no sobre la piel. Antideslizante, permeable al aire, esterilizable en autoclave (sin el envase original). Fácil de aplicar y rasgable en sentido transversal.

Indicada para prevención de roturas musculares, vendajes de soporte, descarga de lesiones leves y moderadas, como torceduras y esguinces articulares y roturas musculares. Especialmente para deportistas y veterinaria. Disponible en diferentes colores.

Clasificación (RPS (UE) 2017/745): Clase I

1. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

La unidad de CPK SPORT está constituida por:

- Tejido no tejido elástico longitudinalmente con la siguiente composición:
- · polipropileno 91%.
- · elastano 9%.
- Masa cohesiva sin látex dispuesta en forma de fina capa aplicada uniformemente sobre la superficie de la venda.
- · Centro de polipropileno o similar.
- · Bolsa de polipropileno transparente microperforada.
- 2. ENVASADO
- 2.1 Envase presentación o de venta:

Grupo unidix Teléfono: +34 91 776 53 63 Mail: info@clinimark.es



- · Caja de cartón corrugado con 24 o 15 unidades.
- · Bolsa de plástico retráctil (polietileno) con 2 envases de 24 o 15

unidades, lo que constituye la unidad de venta.

3. DESCRIPCIÓN

Venda cohesiva de compresión sin látex de elasticidad longitudinal fácilmente rasgable en sentido transversal. Disponible en varios colores: beige, rojo, azul, verde y negro.

4. PROPIEDADES

Gracias a su elasticidad longitudinal y a su efecto cohesivo permite un vendaje rápido, sin pliegues y afín a la piel.

No se adhiere a la piel, cabello o ropa, sólo se fija sobre sí misma. Totalmente antideslizante. Cómoda, ligera, porosa, fácil de aplicar y moldeable. Permeable al aire y a vapor.

Resistente a ungüentos y pomadas.

Permeable a los rayos X.

Esterilizable por vapor sin su en envase original. La esterilización puede afectar a las características del producto (color, tacto y parámetros físicos), no obstante no impide su utilización.

No contiene látex.

5. INDICACIONES

CPK SPORT está indicado para vendajes de compresión para profilaxis de trombosis y tratamiento posoperatorio de cirugía de varices, vendajes de soporte después de deformaciones, luxaciones y lesiones de músculos y tendones, vendajes permanentes para el tratamiento de lesiones de tórax, vendajes de alivio para el tratamiento posoperatorio de fracturas y lesiones deportivas y para la fijación de apósitos.

Para aplicación en medicina deportiva, ideal para su uso en combinación con esparadrapo.

6. CONTRAINDICACIONES

No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes.

No utilizar en caso de problemas arteriales, problemas vasculares graves y en caso de edema severo (a criterio del profesional médico).

7. PRECAUCIONES

Producto para un solo uso.

Producto no estéril, no aplicar sobre heridas abiertas y/o zonas de punción con el fin de evitar posibles infecciones al paciente.

No introducir el producto sin esterilizar en zonas estériles (p.ej. quirófanos). No aplicar el vendaje con excesiva tensión.

En caso de desarrollar dolor, palidez, enfriamiento o adormecimiento retirar el vendaje inmediatamente. Si el dolor persiste o en caso de situaciones

Grupo unidix Teléfono: +34 91 776 53 63 Mail: info@clinimark.es



adversas consultar con el farmacéutico, fisioterapeuta o profesional médico.

8. CADUCIDAD

3 años almacenado en lugar fresco (entre 5°C y 30°C), seco y protegido de

la luz del sol en su envase original.

FABRICANTE

FARMABAN