

# LANCETA babyLance™



## NOMBRE DEL PRODUCTO

babyLance™

FABRICANTE: MediPurpose Pte. Ltd.

**DESCRIPCIÓN** El dispositivo de incisión en el talón babyLance™ es un dispositivo de un solo uso que permite realizar incisiones uniformes, indoloras y de sangrado rápido.

El perfil de incisión de babyLance produce una incisión ligeramente Curvada o pendular, sin marcas de punción traumática o corte irregular o dentado.

Con seguro antidisparo involuntario o accidental.

Cumple con las directrices LA4.A5 del CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute).

**INDICACIONES** Dispositivo de seguridad de corte para la obtención de sangre capilar en el talón de neonatos para el cribado neonatal.

Diseñado para uso profesional.

**COMPOSICIÓN** Carcasa de nailon  
Cuchilla de acero inoxidable

## CONTENIDO

Caja de 50 o 200 unidades, en envase unitario estéril

Referencia	Descripción	Presentación Caja de:	GTIN
BLM50	BabyLance Micro-Preemie. Peso del bebé inferior a 1 kg. Incisión de 2,2 mm de L y 0,60 mm de profundidad.	50 uds.	38886354702493
BLM200		200 uds.	58886354702497
BLP50	BabyLance Preemie. Peso del bebé entre 1-2,5 kg. Incisión de 3,0 mm de L y 0,85 mm de profundidad.	50 uds.	38886354702332
BLP200		200 uds.	58886354702169
BLN50	BabyLance Newborn. Peso del bebé entre 2,5-9 kg. Incisión de 3,0 mm de L y 1,0 mm de profundidad.	50 ud.	38886354702158
BLN200		200 ud.	58886354702152

**ESTERILIZACIÓN** Radiación  
**SEGURIDAD** Producto estéril. No reutilizar  
**CONSERVACIÓN** Temperatura ambiente  
**CERTIFICACIÓN** CE 0197  
**CADUCIDAD** 4 años  
**MEDIO AMBIENTE** Debe desecharse como residuo sanitario

### Modo de utilización

Romper la pieza de seguridad con un leve giro a derecha o izquierda, situar en la zona de incisión del talón del bebé y presionar el botón de activación de la hoja de corte quirúrgico.

### Descripción del perfil de incisión

Estas indicaciones son una sugerencia. Ha de ser el criterio del equipo médico el que determine qué modelo babyLance™ ha de utilizarse en cada caso.