

# BOLSA DE ORINA 4L CON GRIFO

## UNIDIX

Bolsa con grifo para la recogida de orina con diferentes fines terapéuticos o diagnósticos sin estar en contacto con el cuerpo. El sistema de vaciado mediante grifo permite la extracción de la orina sin necesidad de manipular la conexión al catéter.

Producto no estéril y/o estéril mediante EO.

Desechable, de un solo uso. Libre de látex.

### Propiedades Tubo

Composición PVC.

- Longitud: 900mm
- Diámetro
  - Interno 7mm
  - Externo 9.8mm

Clamp móvil.

### Propiedades Bolsa

Compuesta de PVC.

- Apariencia: Transparente fondo blanco.
- Válvula antiretorno
- Corte e impresión con termosellado.
- Ojales de sujeción en esquinas superiores.
- Capacidad nominal 4000ml.
- Grosor pared 0.125mm.



### Propiedades Conector

- Composición:
  - Conector PVC transparente
  - Tapón PE azul
- Compatible con las partes conectoras de los catéteres
- Punto de extracción de muestras sin aguja.

### Propiedades Grifo

- Grifo en cruz.
- Sistema de apertura/cierre seguro mediante desplazamiento horizontal de la pieza azul.

## MODO DE EMPLEO DE BOLSA DE ORINA CON GRIFO UNIDIX

- › Extraer del paquete.
- › Verificar que el grifo está cerrado
- › Retirar la capucha protectora y conectar a la sonda.
- › Una vez lleno desplazar la pieza de apertura del grifo hasta vaciado y volver a cerrar.

## BENEFICIOS

- › Permite valorar el drenaje obtenido; fondo blanco para coloración y escala medidora para cantidad (valor aproximado)
- › Permite visualizar el tubo de drenaje y mantenerlo limpio y sin obstrucciones.
- › Perímetro con doble soldadura que garantiza la recogida del fluido, sin pérdidas.
- › Tubo de drenaje flexible que permite ser pinzado y despinzado. Incorpora abrazadera.
- › Conector a sonda con rugosidades que permiten un mejor agarre de la misma.
- › Gracias a su punto de extracción de muestras se puede realizar dicho procedimiento sin desconectar la sonda de la bolsa y sin necesidad de usar agujas.
- › Aporta un entorno de higiene y limpieza al permitir el vaciado de la bolsa sin la necesidad de la desconexión del catéter.
- › Partes del grifo en distintos colores que permiten identificar visualmente si el grifo está abierto o cerrado.
- › Material biocompatible y 100% exento de látex. Libre de DEHP.

## REFERENCIAS, UNIDADES Y CÓDIGO DE BARRAS

| MODELO     | REFERENCIA | UDS. | EAN13         |
|------------|------------|------|---------------|
| No estéril | 4LGM       | 50   | 8432229551261 |
| Estéril    | 4LESGM     | 100  | 8432229551285 |

Fabricadas para GRUPO UNIDIX en conformidad con la Directiva 93/42/EEC. Producto Clase I (modelo no estéril) y Is (modelo estéril).

Evaluación biológica acorde EN ISO 10993-1:2018, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-6:2009, ISO 10993-7:2008, ISO 10993-10:2010.

Acorde a la norma símbolos a utilizar en las etiquetas, el etiquetado y la información a suministrar EN ISO 15223-1:2016

Aseguramiento de la calidad acorde EN ISO 13485:2016.