

MASCARILLA ADULTO PARA OPTICHAMBER - CAJA DE 10 UDS



Las mascarillas Lite Touch Diamond han sido diseñadas para ser utilizadas junto con la cámara de inhalación Optichamber Diamond. Su uso está indicado solo en aquellos casos en los que el paciente no colabora en la administración del fármaco en aerosol

DESCRIPCIÓN

Tienen forma anatómica cubriendo perfectamente nariz y boca

La mascarilla se ajusta a la superficie de la cara sin presión, solo con el vacío generado con la inspiración, proporcionando un perfecto autosellado

Consta de dos piezas engarzadas entre si: el cuerpo y el reborde almohadillado

El reborde almohadillado es muy suave para no dañar la piel de la cara del paciente.

CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES

Marca CE

Clase I

No Estéril

Bajo volumen muerto.

Peso medio: 24 gramos

Cuerpo fabricado de Policarbonato

Reborde almohadillado fabricado de silicona de alta calidad grado médico.

Libre de látex

INSTRUCCIONES DE USO

1. Conectar la mascarilla a la boquilla de la cámara Optichamber Diamond observando que la forma de la nariz quede alineada con la válvula espiratoria de la cámara

2. Seguir las instrucciones de uso de la cámara de inhalación

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Sumerja la mascarilla en agua tibia con un detergente líquido suave

2. Agite con la mano suavemente durante un minuto.

3. Deje las piezas en remojo durante al menos 10 minutos

4. Enjuague las piezas bajo el chorro de agua tibia y limpia, y sacuda el exceso de agua

5. Deje que se seque muy bien al aire antes de volver a montarla

CONSERVACIÓN

Cuando no esté en uso, guarde la mascarilla en su envase original o en un envase adecuado

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No deje que los niños jueguen con la mascarilla. Debe utilizarse únicamente para el tratamiento

Si no sabe cómo debe utilizar la mascarilla, consulte las instrucciones de uso, a su farmacéutico o a su médico

OBSERVACIONES

Antes de usar la mascarilla, examine su interior.

Se requiere la supervisión de un adulto cuando es un niño quien usa la mascarilla.

No está financiada por el Sistema Nacional de Salud (SNS)